

医04 整形用品

* 一般医療機器	手術用被覆・保護材	34654000
	綿状創傷被覆・保護材	11751000
	熱傷被覆・保護材	11322101

## 滅菌オオサキサンドガーゼF

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 再滅菌禁止
- \* 裁断加工禁止 [吸収材が漏れるため]

#### \*【形状・構造及び原理等】

- 本品は皮膚の創傷を被覆及び保護し、体液を吸収するために用いる、多層構造の滅菌した非固着性吸収パッドである。
- 表面材：ポリエチレンテレフタレート  
吸収材：綿、パルプ、高吸収ポリマー  
防水材：パルプ、ポリエチレン

#### \*【使用目的又は効果】

- 術後創傷のために用いる適切なサイズの被覆・保護材をいう。
- 皮膚又は口腔内粘膜の創傷を被覆するために用いる、コットン、合成繊維、親水性ポリマー等からなるパッドをいう。ただし、口腔内粘膜に使用する場合は、一時的又は短期的に使用するものに限る。
- 熱傷皮膚を被覆及び保護し、熱傷部位の滲出液を吸収するために用いる幅広の層状ガーゼパッドをいう。

#### \*【使用方法等】

- 清潔な手で取り扱い、患部を適切に清拭、洗浄してから使用すること。
- 防水面を当てると体液などを吸収しないため、フィルム側の吸収面を患部に当てること。
- 患部の大きさに応じ、適当な大きさのものを選択し使用すること。
- 本品使用中は患部の観察を十分に行い、体液の量や患部の状態に応じて適切な交換及び処置を行うこと。
- ズレを防止するため、医療用テープ、包帯や腹帯などを用いて、本品を患部へ固定して使用すること。特に顔面や頸部に使用する際は、本品がズレて気道を塞がないよう十分に注意すること。
- 創部の状態によっては固着することもあるため、必要に応じて軟膏などを併用し、表面材と患部の固着を予防すること。
- 交換時は無理に剥がさず、固着している場合は生理食塩水などで湿らせ、患部の損傷に注意をしながら剥がすこと。

#### \*【使用上の注意】

##### 1.重要な基本的注意

- 患部に臨床的感染、又はその恐れがある場合は、頻繁に観察し、適切な処置を行うこと。また、全身状態が悪い場合は特に注意して使用すること。  
[症状を悪化させる恐れがあるため。]
- 本品使用中に、新たに皮膚障害と思われる症状があらわれた場合は、使用を中止し、適切な処置を行うこと。
- 意識レベルを考慮し、誤飲や誤食に留意して使用すること。
- 体内への深い挿入、埋め込み又は留置をしないこと。

##### 2.不具合・有害事象

本品使用中は、以下の不具合や有害事象発生の恐れがある。

- 創の感染症状
- 創傷及び周囲の皮膚障害(表皮剥離、浸軟、浮腫、水疱、発赤、びらん、そう痒、アレルギー、接触性皮膚炎)
- 固着
- 壊死組織の増加
- 疼痛

#### 3.その他の注意

- 軟膏などを併用する際は、表面材全面に軟膏などを塗布すると体液の吸収を妨げるため、注意して使用すること。
- 開封後は速やかに使用すること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### 1.保管方法

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

##### 2.有効期間

容器又は被包の「使用期限」に表示【自己認証(当社データ)による】。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

オオサキメディカル株式会社

お問い合わせ先 Tel 0120-15-0039