

## 滅菌オオサキ医療用はさみ

### 【禁忌・禁止】

1. 本製品を他の用途に使用すると製品の性能・機能が損なわれるおそれがあるため、使用目的以外に使用しないこと。
2. 破損等の原因となるため、本製品を曲げる、削る等の加工・改造を行わないこと。
3. 以下の製品とは併用しないこと
  - a) 電気メス等の電気手術器械
  - b) 除細動器

### 【形状・構造及び原理等】

1. 形状、構造  
代表的写真



2. 原材料/材質  
ステンレス
3. 作動・動作・原理  
回転軸のある2枚の内向きの刃からなり、2枚の刃を閉じることによって対象物を切断する。

### 【使用目的又は効果】

通常、手術時の組織、布、縫合糸等の切断に用いる器具をいう。回転軸のある2枚の刃(通常、ハンドルに親指と他の指用の穴がある)からなり、切断する材料の上で2枚の刃を閉じることによって操作する。

### 【使用方法等】

- ・使用前に傷、変形の有無、ジョイント部の動き等に異常が無いことを確認すること。
- ・再使用時には必ず医療機関によって検証された方法によって洗浄・滅菌すること。

### 【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
  - ・本品をクロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)患者、またはその疑いのある患者に使用した場合はクロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)に関する国内規制及びガイドライン等を遵守すること。
  - ・本品出荷時は滅菌済みであるため、開封後は速やかに使用すること。
  - ・体内へ留置しないこと。
  - ・繰り返し使用により性能が落ちる場合があるため、異常を感じた場合は使用を中止すること。
2. その他の注意  
本製品使用後は、汚れが乾燥し、落ちにくくなるのを防ぐため、速やかに洗浄等を行うこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
  - ・直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
  - ・本品を単体で保管する場合は、変形、損傷の原因となるため、硬いものとの接触や衝撃を避けること。
2. 使用期限  
容器又は被包の「使用期限」に表示【自己認証(当社データ)による(出荷時)】。

### 【保守・点検に係る事項】

- 洗浄・消毒・滅菌
- ・再使用時には必ず医療機関によって検証された方法によって洗浄・滅菌すること。
  - ・汚れが乾燥し落ちにくくなるのを防ぐため、付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちに洗浄し消毒すること。
  - ・金属タワシ、クレンザー(磨き粉)等は、器具表面を損傷させるため、使用を避けること。
  - ・洗浄剤、消毒剤などはそれぞれの製品の添付文書に記載された方法に従って使用すること。
  - ・洗浄後、傷、変形の有無、ジョイント部の動き等に異常が無いことを確認すること。
  - ・洗浄後、腐食防止のため、直ちに乾燥させること。
  - ・仕上げすぎには精製水、濾過水等を推奨する。
  - ・超音波洗浄器、オートクレーブ、乾燥機などは、それぞれの製品の添付文書に記載された方法に従って使用すること。
  - ・廃棄する場合は、付着した血液、体液、組織などの汚物を除去・洗浄した後に処分すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者  
オオサキメディカル株式会社  
お問い合わせ先 Tel 0120-15-0039