

医04 整形用品

一般医療機器 コットンボール 11028000

鼻コットン

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

オオサキメディカル株式会社

お問い合わせ先 Tel 0120-15-0039

【形状・構造及び原理等】

綿100%の脱脂綿を棒状にして、フィブリル化セルロースを噴霧した製品です。

【使用目的又は効果】

様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる綿繊維の棒状の塊をいう。

【使用方法等】

適宜使用すること。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・鼻のサイズに合わない場合は使用しないこと。
- ・鼻の奥まで入れすぎないように注意すること。
- ・呼吸が困難になったり、肌に異常が出た場合は、使用を中止すること。
- ・鼻に入れて息を強く吸い込まないこと。
- ・万一、鼻から取り出せなくなった場合は医師に相談すること。
- ・形を変えて使用しないこと。
- ・小児が使用する場合は、保護者の指導監督のもと使用すること。
- ・水分を多く吸収した場合、息が出来なくなる可能性があるため早めに交換すること。
- ・開封後は早めに使用すること。
- ・綿の表面や内部に黄色又は黒色の斑点状のものが見つかることがあるが、綿の実殻であるため、使用上に支障はない。

【保管方法及び有効期間等】

- ・直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- ・小児の手の届かない場所に保管すること。