

器12 理学診療用器具

一般医療機器 止血用押圧器具 70617000

## オオサキ止血用圧迫綿

### 再使用禁止

---

**【禁忌・禁止】**

再使用禁止

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者

オオサキメディカル株式会社

お問い合わせ先 Tel 0120-15-0039

**【形状・構造及び原理等】**

ポリプロピレン・ポリエチレン複合繊維又はパルプを円筒状に加工した製品です。

**【使用目的又は効果】**

血管造影、その他の診断処置終了時に、大腿部又は前腕(橈骨動脈)部のカテーテル挿入部位を圧迫止血するために用いる器具をいう。

**【使用方法等】**

- ・使用用途に合わせて適切なサイズを選択すること。
- ・止血部分に圧迫止血できる程度に押さえ、テープや包帯で固定する。
- ・適宜滅菌して使用すること。
- ・滅菌は、E.O.G.滅菌ができる。(パルプ製の商品のみ湿熱滅菌もできる。)

≪使用方法等に関連する使用上の注意≫

ポリプロピレン・ポリエチレン複合繊維製のものは、湿熱滅菌を行わないこと。

[本品が変形する等の破損の原因となるため。]

**【使用上の注意】**

重要な基本的注意

- ・使用前に形状を変更・加工してから使用しないこと。
- ・滅菌後は再滅菌しないこと。
- ・開封後は早めに使用すること。
- ・体内に使用しないこと。
- ・使用中は止血の状態を適宜確認し、圧迫の程度を調節すること。

[患者の状態及び圧迫の程度によって、動脈閉塞、皮下血腫、出血、腫脹、疼痛、痺れ等の症状を有する恐れがあるため。]

**【保管方法及び有効期間等】**

直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。