

器54 医療用捲綿子

一般医療機器 医科用捲綿子 10172000

オオサキ綿棒

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

オオサキメディカル株式会社

お問い合わせ先 Tel 0120-15-0039

【形状・構造及び原理等】

軸の片側または両端に綿体を接着させた綿棒です。

【使用目的又は効果】

身体の一部及び体内で薬剤を塗布すること、治療を適用すること、若しくは検査のための試料を採取すること、又は体内に装着した機械器具の清掃を体組織に触れうる方法で行うことを目的とする。

【使用方法等】

- ・使用用途に合わせて、適切なサイズを選択すること。
- ・適宜滅菌して使用すること。
- ・滅菌は、高圧蒸気滅菌、E.O.G.滅菌ができる。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・本品は未滅菌です。
- ・滅菌後は再滅菌しないこと。
- ・本品を加工しないこと。
- ・開封後は早めに使用すること。
- ・体内へ留置しないこと。
- ・力を入れ過ぎたり、強く押ししたりして、軸を折らないよう注意すること。
- ・本品に破損、折れ曲がり、汚れなどがあった場合は使用しないこと。
- ・綿体の表面や内部に黄色又は黒色の斑点状のものがみられることがあるが、綿の実殻であるため使用上に支障はない。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。