

医03 手術用手袋及び指サック

一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 70976000

オオサキ ニトリルグローブN1

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者
オオサキメディカル株式会社
お問い合わせ先 Tel 0120-15-0039

【形状・構造及び原理等】

アクリロニトリルブタジエンゴムを主材料とし、副材料に滑材を含まない(パウダーフリー)、未滅菌の使い捨て検査・検診用手袋。

サイズ	SS	S	M	L
全長(mm)±5	240			
掌幅(mm)±5	75	85	95	105

【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する。

【使用方法等】

小箱取り出し口より本品を丁寧に取り出して使用する。

【使用上の注意】

1. 使用注意
 - 1)患者及び使用者の体質によっては、かゆみ、かぶれや発疹などが発生することがあるため、異常を感じた場合には、直ちに使用を中止すること。必要に応じて医師に相談し、適切な処置を行うこと。
 - 2)薬品や薬液などによっては膨潤したり、浸透したりする場合があるため、確認して使用すること。
 - 3)本品を強い化学薬品に対し長時間直接使用しないこと。
 - 4)着色ムラがある場合があるが、品質上問題はない。
2. 重要な基本的注意
 - 1)万一、包装が破損、汚損している場合や、製品に破損やピンホールなどの異常が認められる場合には使用しないこと。
 - 2)刃物などの鋭利な器具に触れると破れたり、穴が開くことがあるため注意すること。
 - 3)複数の患者には使用しないこと。
3. その他の注意
使用後の本品は、感染防止に留意し、安全な方法で処分すること。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。