

医03 手術用手袋及び指サック

一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 70976000

## オオサキ プラスチック手袋P1

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

オオサキメディカル株式会社

お問い合わせ先 Tel 0120-15-0039

#### 【形状・構造及び原理等】

ポリ塩化ビニル樹脂を主材料とし、副材料に滑材を含まない（パウダーフリー）、未滅菌の使い捨て検査・検診用手袋。

サイズ	S	M	L	LL
全長(mm)±5	240			
掌幅(mm)±5	85	95	105	115

#### 【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する。

#### 【使用方法等】

小箱取り出し口より本品を丁寧に取り出して使用する。

《使用方法等に関連する使用上の注意》

- 薬品や薬液などによっては膨潤したり浸透する場合があるため、確認して使用すること。
- 包装が破損、汚損している場合や、製品に破損やピンホールなどの異常が認められる場合には使用しないこと。
- 刃物などの鋭利な器具に触れると破れたり、穴が開くことがあるため注意すること。

#### 【使用上の注意】

- 使用注意(次の患者には慎重に適用すること)  
使用時に異常を感じた場合には、直ちに使用を中止すること。  
必要に応じて医師に相談し、適切な処置を行うこと。  
[患者及び使用者の体質によっては、かゆみ、かぶれや発疹などが発生することがあるため]
- 重要な基本的注意  
複数の患者には使用しないこと。
- その他の注意
  - 使用後の本品は、感染防止に留意し、安全な方法で処分すること。
  - 着色ムラがある場合があるが、品質上問題はない。

#### 【保管方法及び有効期間等】

- 保管方法  
直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

- \* 2.有効期間  
容器又は被包の「使用期限」に表示【自己認証(当社データ)による】。