

医04 整形用品

一般医療機器 綿状創傷被覆・保護材 11751000

吸収ケアパッドⅠ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・裁断加工禁止 [吸収材が漏れるため。]

【形状・構造及び原理等】

- ・本品は皮膚の創傷を被覆・保護し体液を吸収するために用いる、合成繊維、親水性ポリマーなどからなるパッドをいう。
- ・表面材：ポリオレフィン、ポリエステル
吸収材：バルブ、高吸収ポリマー
防水材：ポリオレフィン
結合剤：スチレン系接着剤

【使用目的又は効果】

創傷などを被覆・保護し体液を吸収する。

【使用方法等】

- ・清潔な手で取り扱い、患部を適切に清拭、洗浄してから使用すること。
- ・防水面を当てると体液などを吸収しないため、白色の吸収面を患部に当てること。
- ・状態に応じて軟膏などを併用し、表面材と患部の固着を予防すること。
- ・本品使用中は患部の観察を十分に行い、体液の量や患部の状態に応じて適切な交換及び処置を行うこと。
- ・摩擦やズレを防止するため、医療用テープ、包帯、腹帯などを用いて、本品を患部へ固定して使用すること。特に顔面や頸部に使用する際は、本品がズレて気道を塞がないよう十分に注意して使用すること。
- ・交換時は無理に剥がさず、固着している場合は生理食塩水などで湿らせ、患部の損傷に注意をしながら剥がすこと。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- ・患部に臨床的感染、又はその恐れがある場合は、頻繁に観察し、適切な処置を行うこと。また、全身状態が悪い場合は特に注意して使用すること。
[症状を悪化させる恐れがあるため。]
- ・本品使用中に、新たに皮膚障害と思われる症状があらわれた場合は、使用を中止し、適切な処置を行うこと。
- ・意識レベルを考慮し、誤飲や誤食に留意して使用すること。
- ・体内への深い挿入、埋め込み又は留置をしないこと。

2. 不具合・有害事象

本品使用中は、以下の不具合・有害事象発生の恐れがある。

- ・創の感染症状
- ・創傷及び周囲の皮膚障害(表皮剥離、浸軟、浮腫、水疱、発赤、びらん、そう痒、アレルギー、接触性皮膚炎)
- ・固着
- ・壊死組織の増加
- ・疼痛

3. その他の注意

- ・軟膏などを併用する際は、表面材全面に軟膏などを塗布すると体液の吸収を妨げるため、注意して使用すること。
- ・包装及び本品が汚損又は破損している場合は使用しないこと。
- ・開封後は早めに使用すること。
- ・滅菌はE.O.G.滅菌ができる。高圧蒸気滅菌やプラズマ滅菌はしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

オオサキメディカル株式会社

お問い合わせ先 Tel 0120-15-0039