

器12 理学診療用器具

一般医療機器 止血用押圧器具 70617000

滅菌マールパッドⅠ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

レーヨン・ポリエチレンテレフタレート複合繊維を円盤状に加工し、滅菌した製品です。

【使用目的又は効果】

血管造影、その他の診断処置終了時に、大腿部又は前腕(橈骨動脈)部のカテーテル挿入部位を圧迫止血するために用いる器具をいう。

【使用方法等】

止血部分に圧迫止血できる程度に押さえて、テープや包帯などで固定する。

【使用上の注意】

- 重要な基本的注意
 - 使用前に形状の変更や加工してから使用しないこと。
 - 体内に使用しないこと。
 - 使用中は止血の状態を適宜確認し、圧迫の程度を調節すること。
[患者の状態及び圧迫の程度によって、動脈閉塞、皮下血腫、出血、腫脹、疼痛、痺れなどの症状を有する恐れがあるため。]
 - 診察及び処置終了後には速やかに、また確実に取り出すこと。
- その他の注意
 - 包装及び本品が汚損又は破損している場合は使用しないこと。
 - 開封後は速やかに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 保管方法
直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- 有効期間
容器又は被包の「使用期限」に表示【自己認証(当社データ)による】。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
オオサキメディカル株式会社
お問い合わせ先 Tel 0120-15-0039