

医04 整形用品

一般医療機器 綿状創傷被覆・保護材 11751000
熱傷被覆・保護材 11322101

滅菌サラフィットI

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

- ・本品は皮膚の創傷を被覆及び保護し、体液を吸収するために患部に当てて使用する、脱脂綿を多孔性ポリエチレンテレフタレートシートで挟んで滅菌した非固着性吸収パッドです。
- ・表面材：ポリエチレンテレフタレート
吸収材：綿

【使用目的又は効果】

皮膚又は口腔内粘膜の創傷を被覆するために用いる、コットン、合成繊維、親水性ポリマー等からなるパッドをいう。ただし、口腔内粘膜に使用する場合は、一時的又は短期的に使用するものに限る。熱傷皮膚を被覆及び保護し、熱傷部位の滲出液を吸収するために用いる幅広の層状ガーゼパッドをいう。

【使用方法等】

- ・清潔な手で取り扱い、患部を適切に清拭、洗浄してから使用すること。
- ・本品は防水ではないため、滲出液の量に応じて他の防水性製品などと併用すること。
- ・患部の大きさに応じ、適当な大きさのものを選択し使用すること。
- ・本品使用中は患部の観察を十分に行い、体液の量や患部の状態に応じて適切な交換及び処置を行うこと。
- ・ズレを防止するため、医療用テープや包帯、腹帯などを用いて、本品を患部へ固定して使用すること。特に顔面や頸部に使用する際は、本品がズレて気道を塞がないよう十分に注意すること。
- ・創部の状態によっては固着することもあるため、必要に応じて軟膏などを併用し、表面材と患部の固着を予防すること。
- ・交換時は無理に剥がさず、固着している場合は生理食塩水などで湿らせ、患部の損傷に注意をしながら剥がすこと。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- ・患部に臨床的感染、又はその恐れがある場合は頻繁に観察し、適切な処置を行うこと。また、全身状態が悪い場合は特に注意して使用すること。
[症状を悪化させる恐れがあるため。]
- ・本品使用中に、新たに皮膚障害と思われる症状があらわれた場合は使用を中止し、適切な処置を行うこと。
- ・意識レベルを考慮し、誤飲や誤食に留意して使用すること。
- ・体内への深い挿入、埋め込み又は留置をしないこと。

2. 不具合・有害事象

本品使用中は、以下の不具合や有害事象発生の恐れがある。

- ・創の感染症状
- ・創傷及び周囲の皮膚障害(表皮剥離、浸軟、浮腫、水疱、発赤、びらん、そう痒、アレルギー、接触性皮膚炎)
- ・固着
- ・壊死組織の増加
- ・疼痛

3. その他の注意

- ・表面材を剥がすなど、分解して使用しないこと。
- ・軟膏などを併用する際は、表面材全面に軟膏などを塗布すると体液の吸収を妨げるため、注意して使用すること。
- ・包装及び本品が汚損又は破損している場合は使用しないこと。
- ・開封後は速やかに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
2. 有効期間
容器又は被包の「使用期限」に表示【自己認証(当社データ)による】。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
オオサキメディカル株式会社
お問い合わせ先 Tel 0120-15-0039