

機械器具 09 汎用 X 線診断装置用非電動式患者台（40654000）

一般医療機器 特定保守管理医療機器 設置管理医療機器

撮影台 COMP A-N

【形状・構造及び原理等】

1) 構成


本装置は以下のユニットにより構成される。

- (1) 本体脚部
- (2) 天板枠部
- (3) 天板部
- (4) 受像部
- (5) レベルアジャスター

2) 本体寸法及び重量

寸法 (mm) 幅 690 × 奥行 1800
高さ 600

重量 約 67 kg

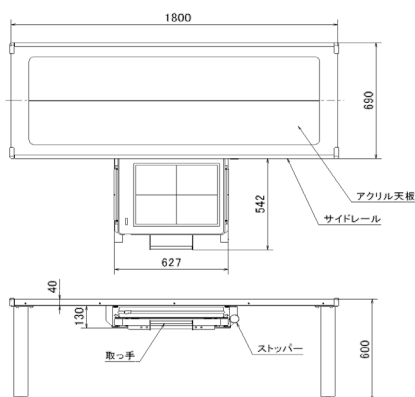

3) 作動・動作原理

受像部の

長手移動 : ストッパーを緩めるにより、手で受像部のローラーがサイドレール内を移動する。

【仕様、使用目的、効能又は効果】

1) 仕様

本体部(単位mm)

天板材質 : 10t : アクリル板

外形寸法 : 690 x 1800

天板面高さ : 600

受像部

長手方向移動 : 820 mm

受像ユニット : DR 「デジタルゲン NAOMI」

重量 : 約 67 kg

2) 使用目的

臥位による X 線一般撮影を効率的に行うことを目的とした撮影台である。

【操作方法又は使用方法等】

使用環境条件

温度 : +10℃～+40℃

湿度 : 30%～75%RH (結露のないこと)

設置上の注意

据え付け設置時は床面の状態を確認、スぺーサー等の調整により水平を確保して下さい。

詳細は取扱説明書を参照してください。

操作方法

- ① ストッパーを緩めることにより、受像部が長手方向に手で移動できます。
- ② 受像部の装着は、取っ手を持ちトレーを引き出してセットしてください。

詳細は取扱説明書を参照してください。

【使用上の注意】

警告

耐荷重を 135 kg に想定しているためそれ以上の体重の患者への使用は避けること。

禁忌・禁止

この装置は防爆型ではないので、装置の近くで可燃性及び爆発性の気体を使用しないこと。

重要な基本的注意

- ① 検査を開始する前に装置に異常がないこと、構成品、付属品が確実に固定されていることを確認すること。
- ② 検査前に患者の位置、状態をよく確認すること。
- ③ 患者が撮影台に乗った時、天板の外に手・足を出さない様に指導すること。
- ④ 撮影台稼働中は患者が勝手に動かない様に指導すること。

高齢者適応

高齢者は握力など体力に問題がある場合は X 線防護衣を着用した介助者を付けるなどして検査に臨むこと。

妊婦・産婦、授乳婦及び小児への適応

- ① 妊婦及び妊娠の疑いのある者及び授乳中の者へ使用する場合は医師の指示のもとで慎重に行うこと
- ② 小児の検査の場合は X 線防護衣を着用した介助者を付けること。

取扱説明書を必ずご参照下さい。

その他の注意

この装置を廃棄する場合は、産業廃棄物となります。
必ず地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業
廃棄物処分業者に廃棄を依頼すること。

【貯蔵方法及び有効期間等】

使用耐用年数（自主基準）
指定された保守点検を実施した場合
7 年

【保守点検に係わる事項】

1) 使用者による保守点検事項

項目	点検頻度	点検内容
目視点検	始業時	キズ、変形、汚れ、等の異常の有無 製品上や周囲に障害物の有無
動作点検	始業時	動作不良、異音、引っ掛り、等の異常の有無
ガタ、ゆるみ、等	月 1 回	各部のガタ、ゆるみ、等が発生していないか
グリス切れ、ホコリ等	月 1 回	駆動部にゴミ、ホコリ等が溜まっていないか グリス・オイル切れが発生していないか

2) 業者による保守点検事項

項目	点検時期	点検内容
定期メンテナンス	年 1 回	各部のチェック、調整、増締め、注油、グリスUP、部品交換、等

* 保守契約、あるいは定期的なスポット点検依頼をして頂く様にお願いします。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

住所 : 埼玉県川口市弥平 2-15-15
氏名 : 株式会社 大林製作所 川口工場
連絡先 : 埼玉県川口市弥平 2-15-15
株式会社 大林製作所 川口工場
TEL (048) 222-3800
FAX (048) 222-4074

製造業者

住所 : 埼玉県川口市弥平 2-15-15
氏名 : 株式会社 大林製作所 川口工場

取扱説明書を必ずご参照下さい。