


機械器具 09 汎用 X 線診断装置用非電動式患者台(40654000)

一般医療機器 特定保守管理医療機器 設置管理医療機器

乳幼児撮影台 Pastel

【形状・構造及び原理等】

1) 形状と各部の名称

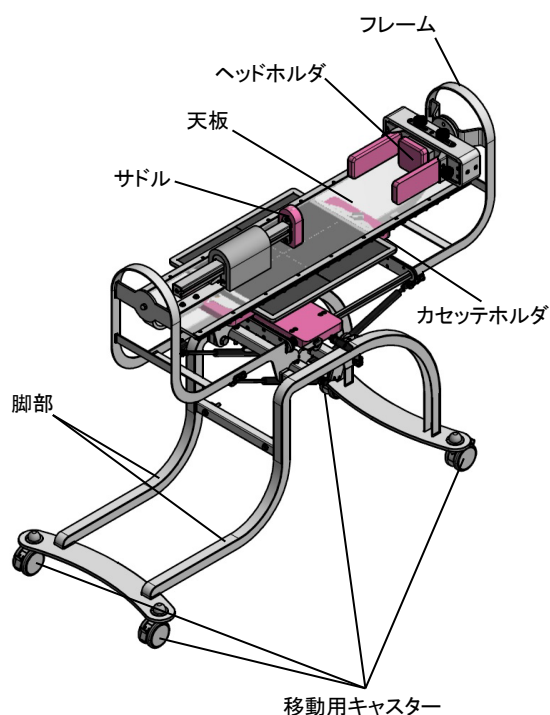

2) 構成

本装置は以下のユニットにより構成される。

- (1) フレーム
- (2) 脚部
- (3) カセットホルダ
- (4) 天板
- (5) サドル
- (6) ヘッドホルダ
- (7) 移動用キャスター
- (8) 固定ベルト

3) 原理

装置の天板・サドル・固定ベルト等を使用して、乳幼児の X 線撮影時の姿勢保持を行うために使用する。
撮影条件に合わせ、臥位撮影用及び立位撮影用に形状を変形可能である。
カセットホルダにカセットを取り付け、胸部及び腹部の X 線撮影を行うことができる。

4) 仕様

寸法

臥位モード : 幅 540 × 全長 1389 × 高さ 971 (±5)

立位モード : 幅 540 × 全長 1166 × 高さ 1281 (±5)

(単位mm)

対応カセット : 10 × 12in ~ 17 × 17in

耐荷重 : 体重 15kg 以下

重量 : 約 60 kg

【使用目的又は効果】

乳幼児の胸部・腹部 X 線撮影を効率よく行うことを目的とした専用撮影台で、臥位正面、立位正面、立位背面、立位側面(右/左)撮影時の姿勢保持を行う機能を有し、乳幼児の胸部及び腹部の X 線撮影をすることが可能な装置である。

【使用方法等】

使用環境条件

温度 : +10℃ ~ +40℃

湿度 : 30% ~ 75% RH (結露のないこと)

使用方法

1. 被験者の固定
天板に被験者を寝かせ、固定ベルト・サドル・ホルダ一を使用して被験者の体躯及び姿勢を固定する。
2. カセットの装着
カセットをカセットホルダに装着し、撮影する箇所に合わせてカセットの位置を調整する。
3. ポジションの選択
撮影箇所及び撮影目的に合わせて、臥位正面・立位正面・立位背面・立位側面(右/左)のポジションを選択し、X 線撮影をおこなう。

取扱説明書を必ずご参照ください。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ①使用を開始する前に装置に異常がないこと、構成品、付属品が確実に固定されていることを確認すること
- ②被検者、操作者、介助者は装置の可動部分や装置と壁や床等に挟まれない様に常に注意を払うこと。
- ③耐荷重 15kg を超える荷重をかけないこと。

乳幼児への適応

必要な場合は、X 線防護衣を装着した介助者を付けて撮影をおこなうこと。

その他の注意

この装置を廃棄する場合は、産業廃棄物となるので必ず地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処分業者に廃棄を依頼すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

使用環境条件に準ずる

温度：+10℃～+40℃

湿度：30%～75%RH(結露のないこと)

使用耐用年数(自主基準)

使用環境条件を満たした環境で

指定された保守点検を実施した場合 7年

【保守・点検に係わる事項】

1) 使用者による保守点検事項

項目	点検頻度	点検内容
目視点検	始業時	キズ、変形、汚れ、等の異常の有無 製品上や周囲に障害物の有無
動作点検	始業時	動作不良、異音、引っ掛り、等の異常の有無
ガタ、ゆるみ、等	月 1 回	各部のガタ、ゆるみ、等が発生していないか
グリス切れ、ホコリ等	月 1 回	駆動部にゴミ、ホコリ等が溜まっていないか グリス・オイル切れが発生していないか

2) 業者による保守点検事項

項目	点検時期	点検内容
定期メンテナンス	年 1 回	各部のチェック、調整、増締め、注油、グリスUP、部品交換、等

* 保守契約、あるいは定期的なスポット点検依頼をして頂く様にお願いします。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

住所：埼玉県川口市弥平 2-15-15

氏名：株式会社 大林製作所 川口工場

連絡先：埼玉県川口市弥平 2-15-15

株式会社 大林製作所 川口工場

TEL (048) 222-3800

FAX (048) 222-4074

製造業者

住所：埼玉県川口市弥平 2-15-15

氏名：株式会社 大林製作所 川口工場

取扱説明書を必ずご参照ください。