

機械器具(12)理学診療用機器

管理医療機器 人体開口部用超音波プローブカバー(JMDNコード 70015000)


オカモトプローブカバー ソフトタッチ レギュラー

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 天然ゴムによるアナフィラキシー症状の既往歴がある医療従事者の使用及び患者への使用は禁止。(使用上の注意の項参照)

【形状・構造及び原理等】

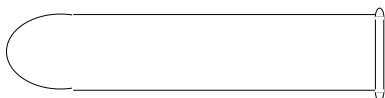

本品は未滅菌である。

＜原材料＞

本体:天然ゴムラテックス製

表面処理剤:コーンスターチ、シリコン油


潤滑剤:シリコン油(ウェットタイプのみ)

【使用目的】

本品は、超音波診断装置の経膈用探触子(プローブ)に被せることにより、体腔内(膈)に挿入した際のプローブの汚染を防ぐ。

【使用方法等】

1. 本品を個別包装内の端によせ、本品から遠い端を指で破り、本品にキズをつけないように取り出します。
2. プローブ先端(超音波発信部)に超音波用ゼリーを適量滴下します。
3. 本品を巻き方向に注意してプローブの上に置きます。(逆むきに置きますと巻きほぐせません。)
4. 本品を両手の指でゆっくりとプローブの根元に向かってころがし、プローブ全体に被せます。
5. 被せ終わったらプローブグリップ部と本品の端を一緒に握り、本品を固定したまま操作してください。その際に、本品を引張気味に握りますと、プローブ先端と本品との間の空気を除去しやすくなります。(空気が入りますと画像に影響がでます。)
6. 使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分してください。

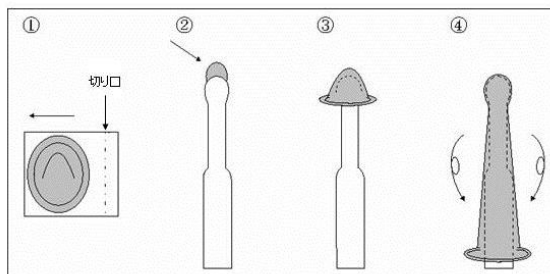

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な処置を施してください。
- 天然ゴムと接触する機会の多い方々は天然ゴムアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、使用に関しては注意してください。
- 製品が若干巻きほぐしにくいことがありますので、爪やプローブなどで製品にキズをつけぬようにていねいに巻きほぐしてください。そのときのキズが破れの原因となります。
- 刃物等鋭利な器具に触れると破れたり、穴があくことがありますので、注意してください。

2. 相互作用

薬品、溶剤等によっては膨潤したり、浸透したりする場合がありますので確認の上ご使用ください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 水濡れに注意し、直射日光、オゾン、高温や多湿を避けて保管してください。また、揮発性の成分と一緒に保管しないでください。
- 購入時の包装に入れたまま保管し、その都度取り出してください。

2. 使用期間 (自己認証による)

箱及び/又は袋の記載を参照のこと[自己認証(当社データ)により設定]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

オカモト株式会社

TEL. 03-3817-4172(手袋・メディカル部)