器具12 理学診療用器具

管理医療機器 人体開口部用超音波プローブカバー JMDN コード:70015000

オカモトプローブカバー ソフトタッチ ポリウレタン

再使用禁止

【禁忌·禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は未滅菌品である。

・主原料:ポリウレタン

寸法

全長:175 ± 5 mm、折幅 52±2mm

【使用目的又は効果】

超音波プローブ (経膣用) に装着し、体液等から保護するために用いること(単回使用のものに限る)。

【使用方法等】

- 1. 本品を個別包装内の端によせ、本品から遠い端を指 で破り、本品にキズをつけないように取り出しま す。
- 2. プローブ先端(超音波発信部)に超音波用ゼリーを 適量滴下します。
- 3. 本品を巻き方向に注意してプローブの上に置きます。(逆向きに置きますと巻きほぐせません。)
- 4. 本品を両手の指でゆっくりとプローブの根元に向かってころがし、プローブ全体に被せます。
- 5. 被せ終わったらプローブグリップ部と本品の端を一緒に握り、本品を固定したまま操作してください。 その際に、本品を引張気味に握りますと、プローブ 先端と本品との間の空気を除去しやすくなります。 (空気が入りますと画像に影響が出ます。)
- 6. 使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分して ください。

【使用上の注意】

1. 重大な基本的注意

製品が若干巻きほぐしにくいことがありますので、 爪やプローブなどでキズをつけぬようにていねい に巻きほぐしてください。そのときのキズが破れの 原因となります。

2. 相互作用

・薬品、溶剤等によっては膨潤したり浸透したりする 場合がありますので確認の上ご使用ください。

【保管方法及び有効期間等】

1)保管方法

- ・水濡れに注意し、直射日光、オゾン、高温や多湿を 避けて保管してください。また、揮発性の成分と一 緒に保管しないでください。
- ・購入時の包装に入れたまま保管し、その都度取り出してください。
- 2)使用期間(自己認証による)
- ・箱及び/又は袋の記載を参照のこと [自己認証(当社データ)により設定]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売元] オカモト株式会社 東京都文京区本郷 3 丁目 27 番 12 号 03-3817-4172 (手袋・メディカル部)