

医04 整形用品
一般医療機器 X線造影材入りスポンジ 13705000

柄付ガーゼX線入

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと
- X線造影糸部分をつかまないこと。
(X線造影糸を直接挟むと、切れたり、抜け落ちて体内に残存するおそれがある)

【形状、構造及び原理等】

綿100%のガーゼ数枚を重ね、綿100%の糸で縫製したものの。

四角形で、その一角に体内残留を防ぐ目的で綿テープを取り付けてある。

体内残留防止のためX線造影用の糸を一本以上含有している。

X線造影糸：硫酸バリウムを含有したゴム状のもので、色調は緑色・青色・黒色

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする、X線で検知可能な成分を含有する器具をいう。

【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。

創傷面には滅菌して使用する。

滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。

【使用上の注意】

本品の使用は一回限りです。再使用しないでください。

体内に留置しないこと。

使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理してください。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者 株式会社 奥村商店

大阪府堺市堺区新在家町東2丁2-11

TEL 072-238-6261