

2016年 9月 1日（第2版）（新記載要領に基づく改訂）  
2005年 4月 1日（新様式第1版）

届出番号 27B3X00005000007

医04 整形用品  
一般医療機器 X線造影材入りガーゼ 32374000

## X線ガーゼ滅菌済

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと
- X線造影系部分をつかまないこと。  
（X線造影系を直接挟むと、切れたり、抜け落ちて体内に残存するおそれがある）

### 【形状、構造及び原理等】

綿100%のガーゼの縦糸に一本X線造影糸を織り込んだもの。

X線造影糸：硫酸バリウムを含有したゴム状のもので  
色調は緑色・青色・黒色。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者 株式会社 奥村商店

大阪府堺市堺区新在家町東2丁2-11

TEL 072-238-6261

### 【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、又は擦過傷、乾燥、汚染からの器官の保護を目的として、身体内部又は外科切開部に用いる綿の吸収材料をいう。

X線を検知できる成分を用いている。

### 【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。

包装が開封、破損、水濡れ及び他の汚染が見られる場合は滅菌品として使用しないこと。

一度開封したものは、滅菌状態が保てないので、開封後は全量を消費すること。

### 【使用上の注意】

本品の使用は一回限りです。再使用しないでください。

体内に留置しないこと。

使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理してください。

### 【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

使用期限（自己認証による）は、パッケージに記載