

機械器具 21 歯科用口腔内カメラ JMDN コード 70179000

一般医療機器 歯科用口腔カメラ

オサダ マルチ ビジョン

(OMV-11)

＊【形状・構造及び原理等】

1. 形状

1) 口腔内観察用



2) う蝕観察用



3) 付属品



カメラカバー



カメラホルダー

2. 使用環境条件

下記条件にて使用すること。(但し、結露しないこと)

周囲温度	10 — 40 °C
相対湿度	20 — 75 %
気圧	700 — 1060 hPa

【使用目的又は効果】

本品は、口腔内の情報を画像装置に映し出して、診療、患者への説明等に使用する。

【使用方法等】

1. 使用方法

機器の詳細の使用方法については、使用前に必ず取扱説明書を参照すること。

1) 使用前の準備

- ① ヘッドの取付け
- ② カメラカバーの取付け

2) 使用中の操作

- ① 手元スイッチでの撮影

3) 使用後の処置

- ① カメラカバーの取外し
- ② 保守

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 非常に明るい被写体（照明や太陽など）を長時間にわたって撮影しないこと。
- 2) 口腔内カメラを使用の際は、必ずカメラカバーを装着の上使用し、患者ごとに新しいものに交換すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管の条件

カメラハンドピースは、カメラホルダーに収納し、下記条件にて保管すること。(但し、結露しないこと)

周囲温度	-10—60 °C
相対湿度	10—90 %
気圧	700—1060 hPa

直射日光に長時間さらさないこと

2. 耐用期間

製造の日から、正規の使用方法、保守点検を行った場合に限り 7 年間。(自己認証による)

【保守・点検に係る事項】

1. 清掃・消毒・滅菌

○：適用可 ×：適用不可

	清掃	消毒	滅菌	
	中性洗剤 水拭き	アルコール 清拭	高圧蒸気 滅菌	135℃ 以下 乾燥工程
マルチビジョン	○	○	×	×
スぺーサー	○	○	○	○

※下記のことは行わないこと。

- ① 流水下及び超音波洗浄器での洗浄
- ② 薬液への浸漬
- ③ 酸性水・アルカリ水での洗浄・浸漬。

※詳細については、取扱説明書を参照すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者/製造業者

：長田電機工業株式会社

TEL：03-3492-7651

ホームページ：http://osada-group.jp/

取扱説明書を必ずご参照下さい。