

機械器具 61 ストレート・ギアードアングルハンドピース JMDN コード 70692000

管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名 オサダHL-Cハンドピース

(SH32)

【警告】

本機は歯科治療時以外には使用しないこと。有資格者による歯科治療領域に使用すること。

【禁忌・禁止】

- 1) ストレートハンドピースはモータにきちんと接続して使用すること。
- * 2) 使用するバーはバーメーカー推奨回転速度以下で使用する。
- 3) HL モータ又は HL-D モータに取り付けて使用すること。
- 4) 分解、改造は絶対に行わないこと。
- * 5) バーを挿入し、レバーを戻す(チャックを締める)際は、指を添えて戻すこと。指を添えない場合、又バーを挿入していない場合は、レバーが勢いよく戻りストッパーピンが破損する恐れがある。

【形状・構造及び原理等】



商品名：等速ストレートハンドピース (SH32)

【使用目的・効能又は効果】

HL モータ及び HL-D モータに接続し、歯科治療時に使用します。

【品目仕様】

最高入力回転速度 40,000 min⁻¹ (40,000 回転/分)

【操作方法又は使用方法等】

1. 使用環境条件

下記条件にて使用すること。

周囲温度	10-40 °C
相対湿度	30-75 %
気圧	700-1060 hPa

2. 操作方法

1) 使用前の準備

- ① ストレートハンドピースとモータの接続

2) 使用前の点検

- ① バーの締め付け (指で引っぱり抜けいないことを) 確認
- ② バーの回転確認

3) 操作

- ① スイッチによる操作

4) 使用後の処理

- ① バーの取外し
- ② ストレートハンドピースとモータの取外し
- ③ 清掃・保守

【使用上の注意】

- * 1. ご使用前に口腔外で回転させ、振動、音、温度など異常がないか確認して下さい。異常があった場合には、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店にご連絡下さい。
2. ストレートハンドピースを落としたり、強い衝撃を与えたりしないで下さい。使用不能になる恐れがあります。
3. モータが回転している状態でストレートハンドピースの着脱を行わないで下さい。故障の原因になります。
4. ご使用前にストレートハンドピースがモータに確実に取り付けられているか確認して下さい。
5. バーが回転している状態で口腔内への出し入れをしないで下さい。患者さんがケガをする恐れがあります。
6. バーの着脱は回転が停止してから行って下さい。

7. バーの奥まで完全に挿入して使用して下さい。途中で止めての使用はバーが抜ける恐れがあるので絶対にしないで下さい。
8. 刃物の柄はφ2.35 (ISO 規格) のものを使用して下さい。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管場所の環境条件

下記条件にて貯蔵・保管すること。(但し、結露しないこと)

周囲温度	-10-60 °C
相対湿度	10-90 %
気圧	700-1060 hPa

直射日光に長時間さらさないこと。

2. 保管上の注意事項

- 1) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響が生ずる恐れがない場所に保管すること。
- 2) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
- 3) 傾斜、振動、衝撃 (運搬時を含む) などに対する安定状態に注意すること。

3. 耐用期間

製造の日から、正規の使用方法、保守点検を行った場合に限り7年間。(自己認証による)

【取扱上の注意】

熟練した者以外は機器を使用しないこと。

**【保守・点検に係わる事項】

1. 消毒・滅菌 ○：適用可 ×：適用不可

	消毒	滅菌		
	アルコール 清拭	E0G 滅菌	高圧 蒸気 滅菌	135°C 以下の 乾燥工程
SH32	○	○	○	○

2. 下記のことを行わないで下さい。錆、変色、故障の原因になります。

- ① 薬液への浸漬
- ② 酸性水・アルカリ水での洗浄・浸漬。
- ③ オートクレーブでの乾燥工程 (135°C を超える場合)。
- ④ 乾熱滅菌、高圧アルコール蒸気滅菌。

3. 滅菌パックに入れて滅菌をした後は、そのまま保管して下さい。

4. 使用後直ちに保守オイルで十分に注油・洗浄を行い、滅菌して下さい。

5.  (ウォッシュブルマーク) が付いているハンドピースに関しては、取扱説明書 7 清掃・消毒・滅菌の注意事項を参照して下さい。

【包装】

包装単位：1 個口

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：長田電機工業株式会社
住所：〒459-8001
愛知県名古屋市長高町字中道 11
TEL：052-621-3126
FAX：052-621-8310
* ホームページ：http://osada-group.jp/

製造元：長田電機工業株式会社

取扱説明書を必ずご参照下さい。