

機械器具 58 電動式骨手術器械 JMDN コード 70959010  
管理医療機器

「オサダサージェリーファルコン」の付属品

ST83 チップ / ST83S チップ / ST84 チップ / ST84S チップ / ST97 チップ / ST98 チップ / ST108 チップ

【警告】

- 1) 消耗及び変形したチップは使用しないこと。また指定されたパワー設定以内で使用し、振動が止まるような強い力で押し付けけないこと。[チップが破折し誤飲の恐れがある]
- 2) チップは奥まで確実に取付け（締め付け）て、外れないことを確認すること。  
[取付けが不完全だと使用中外れ、誤飲の恐れがある]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

骨の穴あけ用チップ

ST83 チップ



ST83S チップ



ST84 チップ



ST84S チップ



ST97 チップ



ST98 チップ



ST108 チップ



材質：ステンレススチール

2. 使用環境条件

下記条件にて使用すること。（但し、結露しないこと）

|      |              |
|------|--------------|
| 周囲温度 | 10－40 ℃      |
| 相対湿度 | 30－75 %      |
| 気圧   | 700－1060 hPa |

【使用目的又は効果】

骨手術における切削、切除、切断、穿孔等に用いること。

【使用方法等】

1. 使用パワー設定

7-10 (ST83、ST83S、ST84、ST84S、ST97、ST98)  
7-15 (ST108)

2. 使用方法

1) 使用前の準備

(1) チップの取付け

- ① チップとハンドピースのねじを合わせ、時計方向に回し取付ける。
- ② チップ着脱工具の孔をチップに通し、時計方向に回し締め付ける。

①



②



2) 使用前の点検

- (1) チップの締め付けの緩み及び締め付け位置の確認
- (2) 注水がチップの先端まで届くか確認

3) 操作

(1) パワーの設定

7-10 (ST83、ST83S、ST84、ST84S、ST97、ST98)  
7-15 (ST108)

(2) フットスイッチのオン・オフで動作

4) 使用後の処理

(1) チップの取外し

- ① チップ着脱工具の孔にチップを通す。
- ② チップ着脱工具を反時計方向に回してチップを取外す。

(2) 清掃・保守

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 注水せずに使用しないこと。
- 2) チップの切削力が低下したときは、使用を中止し、新しいチップと交換すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管場所の条件

オートクレーブを行った後に、下記条件にて保管すること。  
（但し、結露しないこと）

|      |              |
|------|--------------|
| 周囲温度 | -10－60 ℃     |
| 相対湿度 | 10－90 %      |
| 気圧   | 700－1060 hPa |

2. 耐用期間

消耗品

【保守・点検に係わる事項】

1. 清掃・消毒・滅菌

○：適用可 ×：適用不可

|     | 清掃          | 消毒          | 滅菌         |                    |
|-----|-------------|-------------|------------|--------------------|
|     | 中性洗剤<br>水拭き | アルコール<br>清拭 | 高圧蒸気<br>滅菌 | 135℃<br>以下<br>乾燥工程 |
| チップ | ○           | ○           | ○          | ○                  |

※患者ごとに滅菌すること。

※滅菌前に、アルコール清拭を行うこと。

2. 保守・点検

使用者による保守点検事項

長期保管した場合は、使用前に十分点検を行ってから使用すること。

| 点検頻度  | 点検内容(概略)      |
|-------|---------------|
| 使用前・後 | チップの消耗及び変形の確認 |

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者/製造業者/設計業者

：長田電機工業株式会社

TEL(本社)：03-3492-7651

ホームページ：http://osada-group.jp/