

歯科材料 09 歯科用研削材料 JMDNコード 70904000
一般医療機器 歯面研磨剤

販売名 オサダポラリスパウダー

【禁忌・禁止】

- 1) 次の患者には使用しないこと。
 - ・発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者
[発疹、皮膚炎などが生じるおそれがある]
 - ・塩分摂取制限を受けている患者
[塩分過剰摂取のおそれがある]
 - ・呼吸器系に重度の障害のある患者
[パウダーが肺に入るおそれがある]
 - ・鼻疾患を持つ患者
[鼻腔にパウダーが入るおそれがある]
- 2) 本品が万一、眼に入った場合には、すぐに流水で15分以上洗い流し、眼科医の診断を受けること。
[刺激を感じるおそれがある]
- 3) 本品が万一、パウダーが皮膚に付いた場合は、流水で十分に洗い流すこと。
[発疹、皮膚炎などが生じるおそれがある]

【形状・構造及び原理等】



原材料：炭酸水素ナトリウム

【使用目的又は効果】

本品は、歯科衛生士、歯科医師等が歯面の清掃及び研磨に用いる粉末状の研磨剤である。

【使用方法等】

「組み合わせて使用する医療機器」

販売名：オサダポラリス
承認番号：21900BZX00303000

1. 使用前の準備
 - 1) 開封
本品を開封する。
 - 2) ノズルの接続
オサダポラリスのパウダーボックス内に本品を入れる。
その際、パウダーボックス内に記された上限ラインを超えないようにする。
2. 使用中の操作
 - 1) オサダポラリスを操作し本品の噴射を行う。
 - 2) オサダポラリスからの噴射と同時にバキュームを使用する。
3. 使用後の操作
 - 1) 残留パウダーの除去
オサダポラリスの回路内に残留した本品の除去を行う。

〈使用方法に関連する使用上の注意〉

- 1) 使用するパウダーは乾燥したパウダーを使用すること。
また粉末を十分にほぐしてからパウダーボックスに入れること。
- 2) 使用する際は、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡、防塵マスクを着用すること。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - 1) パウダーを吸引した場合、鼻をかみ、うがいをして新鮮な空気の場所に移動すること。
 - 2) 発疹、皮膚炎などの過敏症状が現れた場合は、使用を中止し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
下記条件にて保管すること。(但し、結露状態を除く)

周囲温度	10-40 °C
相対湿度	30-75 %
気圧	700-1060 hPa

2. 保管上の注意事項
 - 1) 日光の直射を避ける。
 - 2) 湿気を避け、通風の良いところに保管する。
 - 3) 温度が上がらない場所に貯蔵する。
 - 4) パウダーボックス内に残ったパウダーは捨てるか、又はパウダーボックス内にパウダーを入れたまま保管する。その場合は、パウダーボックスを本体から取外し、パウダーボックスキャップを取付け、冷蔵庫内で保管する。
3. 使用期限
本体外箱記載の使用期限を参照。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者/製造業者：長田電機工業株式会社

TEL(本社)：03-3492-7651
ホームページ：<http://osada-group.jp/>