

機械器具 61 ストレート・ギアードアングルハンドピース JMDNコード 70692000
管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名 オサダTCコントラヘッド (CH27B)

【警告】

本機は歯科治療時以外には使用しないで下さい。有資格者による口腔外科領域の治療にのみご使用下さい。

【禁忌・禁止】

- 1) コントラアングルシャフトにきちんと接続されているかどうか確認してから使用して下さい。
- 2) 分解、改造は絶対に行わないで下さい。

【形状・構造及び原理等】



商品名
オサダTCコントラヘッド (CH27B)

【使用目的・効能又は効果】

歯間隣接面を重点的に清掃・研磨する事によって、う蝕や歯周病を抑制するために使用します。

チップを換えることにより、歯間研磨、ルートプレーニング、オーバーハングの除去、充填物の形態修正、マージン部仕上げ、ショルダーやベベルの角度形成などが出来ます。

エアータービンや通常のマイクロエンジンの回転切削と違い、切削面に溝を作ることなしに平滑な歯面の研磨や仕上げができ、また、隣接面頸部や切端隅角部など、回転切削では到達できない部分を安全に切削出来ます。

【品目仕様】

最高入力回転速度 10,000 min⁻¹(10,000 回転/分)

【操作方法又は使用方法等】

1. 使用環境条件

下記条件にて使用すること。

周囲温度	10-40 °C
相対湿度	30-75 %
気圧	700-1060 hPa

2. 操作方法

1) 使用前の準備

- ①コントラヘッドとコントラアングルシャフトの接続
- ②コントラアングルシャフトとモータの接続

2) 使用前の点検

- ①チップの締め付け（指で引っぱり抜けないこと）を確認

3) 操作

- ①スイッチによる操作

4) 使用後の処理

- ①チップの取外し
- ②コントラヘッドとコントラアングルシャフトの取外し
- ③コントラアングルシャフトとモータの取外し
- ④清掃・保守

【使用上の注意】

1. オサダTCコントラヘッドを落としたり、強い衝撃を与えたりしないで下さい。使用不能になる恐れがあります。
2. 故障の原因になりますので、モータが回転している状態でオサダTCコントラヘッドの着脱を行わないで下さい。又、コントラヘッドの着脱を行わないで下さい。
3. ご使用前にオサダTCコントラヘッドがコントラアングルシャフトに確実に取り付けられているか確認して下さい。
4. モータが回転している状態で口腔内への出し入れをしないで下さい。患者さんがケガをする恐れがあります。
5. コントラヘッドへのチップの着脱は回転が停止してから行って下さい。
6. コントラヘッドへのチップは奥まで完全に挿入して使用して下さい。途中で止めての使用は、チップが抜ける恐れがあるので絶対にしないで下さい。
7. チップはデンタータス社製のプロフィンチップ、エバチップを使用して下さい。
8. オサダ製マイクロエンジン G1、G2、HL-C、HL-D、HL、HD、HS、HK 用の各コントラアングルシャフトで使用出来ます。
9. 最高回転速度は 10,000 min⁻¹ です。ハンドピースの減速比をご確認の上、モータの回転速度を調節してご使用下さい。減速比 2.7:1 または 7.4:1 の減速コントラアングルシャフトでのご使用をお奨めします。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管場所の環境条件

下記条件にて貯蔵・保管すること。(但し、結露しないこと)

周囲温度	-10-60 °C
相対湿度	10-90 %
気圧	700-1060 hPa

直射日光に長時間さらさないこと。

2. 保管上の注意事項

- 1) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響が生ずる恐れがない場所に保管すること。
- 2) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
- 3) 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）などに対する安定状態に注意すること。

3. 耐用期間

製造の日から、正規の使用方法、保守点検を行った場合に限り7年間。(自己認証による)

【取扱上の注意】

熟練した者以外は機器を使用しないこと。

取扱説明書を必ずご参照下さい。

【保守・点検に係わる事項】

1. 消毒・滅菌

○：適用可 ×：適用不可

	消毒	滅菌	
	アルコール清拭	E0G滅菌	高圧蒸気滅菌
CH27B	○	○	○

2. 下記のことは行わないで下さい。錆、変色、故障の原因になります。

- ①薬液への浸漬
- ②酸性水・アルカリ水での洗浄・浸漬。
- ③オートクレーブでの乾燥行程(135℃を超える場合)。
- ④乾熱滅菌、高圧アルコール蒸気滅菌。

- 3. 滅菌パックに入れて滅菌をした後は、そのまま保管して下さい。
- 4. 使用後直ちに保守オイルで十分に注油・洗浄を行い、滅菌して下さい。

【包装】

包装単位：1 個口

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元 ： 長田電機工業株式会社
住所 ： 〒459-8001
 愛知県名古屋市緑区大高町字中道 11
TEL ： 052-621-3126
FAX ： 052-621-8310
ホームページ ： <http://www.osada-electric.co.jp>

製造元 ： 長田電機工業株式会社

取扱説明書を必ずご参照下さい。