

機械器具36医療用ピンセット
一般医療機器 歯科治療用ピンセット（31814000）
歯科治療用ピンセット

【禁忌・禁止】

感作・アレルギー反応を起こす可能性があるので
本品の原材料に対して金属アレルギーの既往歴
がある患者に使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

1.形状

本品の形状は、下図（写真）のとおり。

2.原理

手、指で中央部を挟み先端で脱脂綿等を挟む。

3.原材料

本品の原材料（材質）はステンレス鋼である。



【使用目的又は効果】

本品は歯の治療に用いるピンセットである。

【使用方法等】

中央部を指で挟み先端で脱脂綿等を挟む。

【使用上の注意】

- ① 患者毎に滅菌を行い、感染防止に十分配慮すること。
- ② 洗浄液、消毒液を使用する際は、それらの取扱説明書に従うこと。
- ③ 使用前に損傷や摩耗、変形、機能していない部位がないか点検すること。

- ④ 使用中、本品にねじりや圧をかける際は本品に破損や亀裂が生じないように注意すること。
- ⑤ 先端が細くなっているため、使用にあたり、手、指、患者の口腔内など怪我をしないよう十分注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ① 高温・多湿・直射日光及び水濡れを避け、清潔な場所で保管すること。
- ② 移動保管の際は本品に衝撃がかからないよう取扱いに注意すること。
- ③ 歯科の従事者以外が触れないよう、適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

- ① 洗浄時に金属束子や研磨材を用いないこと。
本品の表面に傷を付ける恐れがある。
- ② 強酸性・強アルカリ性の洗浄剤や消毒液の使用は避けること。
本品を腐食させる恐れがある。
- ③ 洗浄後は流水で十分にすすぎを行い、洗浄剤・消毒液が残らないようにする。
- ④ 本品を保管する際は、十分乾燥させること。

【製造販売業者の氏名又は名称】

- ① 製造販売業者
有限会社小山田製作所
- ② 住所
〒959-1252
新潟県燕市寿町4番2号
- ③ 電話番号
0256-62-2547
- ④ ファックス番号
0256-66-5755