

機械器具36医療用ピンセット
一般医療機器 ピンセット（35079001）
技工用曲ピンセット

【禁忌・禁止】 感作・アレルギー反応を起こす可能性があるので 本品の原材料に対して金属アレルギーの既往歴 がある患者に使用しないこと。 【形状・構造及び原理等】 1.形状 本品の形状は、下図（写真）のとおり。 2.原理 手、指で中央部を挟み先端で脱脂綿等を挟む。 3.原材料 本品の原材料（材質）はステンレス鋼である。  【使用目的又は効果】 本品は歯科技工に用いるピンセットである。 【使用方法等】 中央部を挟み先端で脱脂綿等を挟む。 【使用上の注意】 ① 使用毎に滅菌を行い、感染防止に十分配慮 すること。 ② 洗浄液、消毒液を使用する際は、それらの取扱 説明書に従うこと。 ③ 使用前に損傷や摩耗、変形、機能していない部 位がないか点検すること。 ④ 使用中、本品にねじりや圧をかける際は本品に 破損や亀裂が生じないように注意すること。 ⑤ 先端が細くなっているので、使用にあたり手、指 など怪我をしないよう十分注意すること。	【保管方法及び有効期間等】 ① 高温・多湿・直射日光及び水濡れを避け、清潔 な場所で保管すること。 ② 移動保管の際は本品に衝撃がかからないよう 取扱いに注意すること。 ③ 歯科の従事者以外が触れないよう、適切に保管 管理すること。 【保守・点検に係る事項】 ① 洗浄時に金属束子や研磨材を用いないこと。 本品の表面に傷を付ける恐れがある。 ② 強酸性・強アルカリ性の洗浄剤や消毒液の使 用は避けること。 本品を腐食させる恐れがある。 ③ 洗浄後は流水で十分にすすぎを行い、洗浄剤 ・消毒液が残らないようにする。 ④ 本品を保管する際は、十分乾燥させること。 【製造販売業者の氏名又は名称】 ① 製造販売業者 有限会社小山田製作所 ② 住所 〒959-1252 新潟県燕市寿町4番2号 ③ 電話番号 0256-62-2547 ④ ファックス番号 0256-66-5755
--	---