

汎用X線診断装置用非電動式患者台  
一般医療機器 JMDNコード 40654000  
特定保守管理医療機器 設置管理医療機器  
**立位撮影台・OR-3用受像部**

**【禁忌・禁止】**


- ・機器が不具合状態の場合には使用しないこと
- ・傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)などの場所では使用しないこと

**【形状・構造及び原理等】**

形状 560(W)×560(H)×80(D)

構造 本装置は、本体及びカセットトレイからなる。

原理 受像部のカセットトレイを引き出し、カセット若しくはFPDを装填し、エックス線撮影される。

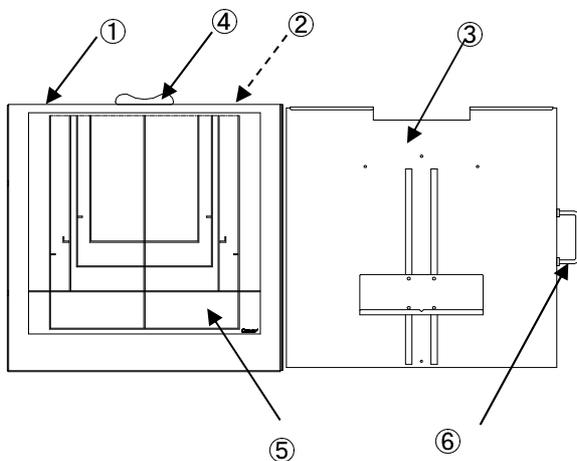

- |             |        |
|-------------|--------|
| ①本体         | ②本体ウラ板 |
| ③カセットトレイ    | ④アゴ受   |
| ⑤カセットサイズシート | ⑥取手    |

**【使用目的又は効果】**

①使用目的

腹部、胸部等のエックス線診断に用いる受像部である。

②クラス分類告示の一般的名称の定義

固定体位式テーブルを備えた非電動式患者台又は空気圧による制御、磁気ロック、クランク、及びレバーなどの機械式のテーブル位置調整制御やテーブル高制御を備えた非電動式患者台をいう。汎用X線装置を必要とする一般/平面画像の撮影や特別な診断、撮影の場合に患者の体位を調整・保持するよう設計されている。固定式又は可動式であり、X線減衰係数の低い放射線透過性材料で作られている。X線画像診断用だけを対象とする。

**【使用方法等】**

- 1.受像部のカセットトレイの取手を手前に引き出して、カセットトレイを引き出す。
- 2.引き出したカセットトレイにカセットを装填する。  
若しくはFPDを装填する。
- 3.カセットトレイを確実に奥まで押し込み、エックス線撮影を行う。

**【使用上の注意】**

1. 水のかからない場所に設置すること。
2. 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、硫黄分を含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に設置すること。
3. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に設置しないこと
4. 機器全般に異常がないことを絶えず監視すること。
5. 故障した時は勝手にいじらず適切な表示を行い、修理は専門家にまかせること。

**【取扱いの注意】**

- 1.本装置を破棄する場合は、自治体の規則に従い、許可を得た産業廃棄物業者に依頼すること。
- 2.本装置を譲渡及び中古販売(賃貸)する場合は、譲渡及び中古販売前に必ず製造販売業者へ連絡すること。

**【保管方法及び有効期間等】**

使用後の機器は清潔にして、高温、多湿に注意し保管すること。

<保管の条件>

周囲温度:-10~60℃

相対湿度:結露しないこと

気圧:700~1060hPa

<耐用期間>

6年[自己認証(当社データ)による]

**【保守・点検に係る事項】**

1. 使用者は機器の日常及び定期点検を行うこと。
2. 一定期間使用した機器は保守点検を業者に依頼すること。
3. しばらく使用しなかった機器を再使用する時には、使用前に必ず正常に、安全に作動することを確認すること。  
詳細は取扱説明書を参照すること。

**【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称等】**

※※製造販売業者 オリオン・ラドセーフメディカル株式会社

電話番号 052-261-0706

※製造業者 美和医療電機株式会社 稲沢工場