

器09 汎用X線診断装置用非電動式患者台
一般医療機器 JMDNコード 40654000
特定保守管理医療機器 設置管理医療機器
X線撮影用臥位テーブル

【禁忌・禁止】

- ・機器が不具合状態の場合には使用しないこと。
- ・傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)のある場所では使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

<形状>

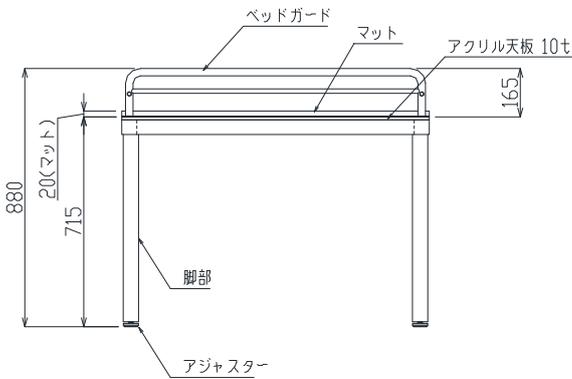
W500×D1020×H880(mm)

<構造>

脚部、アクリル天板部にて構成される。他にエックス線撮影画像に影響が無いマット、落下防止用のベッドガードを配置する。

<原理>

手で受像部を任意の撮影部位に配置し、エックス線撮影を行う。

**【使用目的又は効果】**

<使用目的>

小児、幼児又は乳幼児のエックス線診断に用いる撮影台である。

<クラス分類告示の一般的名称の定義>

固定体位式テーブルを備えた非電動式患者台又は空気圧による制御、磁気ロック、クランク、及びレバーなどの機械式のテーブルトップ位置調整制御やテーブル高制御を備えた非電動式患者台をいう。汎用X線透視装置を必要とする画像撮影又はインターベンションの場合に患者の位置決めをしたり、保持するよう設計されている。固定式、可動式、又は汎用X線装置の設計に組み込まれている場合がある。X線画像診断用だけを対象とする。

【使用方法等】

- ①天板部に被験者(小児、幼児又は乳幼児)を臥位に配置する。
- ②被験者の撮影する部位(位置)に受像部を置く。
- ③エックス線撮影を行う。

【使用上の注意】

1. 機器を設置するときの注意

- ①水のかからない場所に設置すること。
- ②気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、硫黄等を含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に設置すること。
- ③傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)等、安定状態に注意すること。
- ④化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に設置しないこと。

2. 機器を使用する前の注意

- ①テーブルにがたつき等がないこと。
- ②機器に強い衝撃を与えないこと。

3. 機器使用中の注意

- ①機器全般に異常がないことを注意し、使用すること。
- ②機器に異常が発見された場合には、機器の使用を止める等適切な措置を講ずること。

4. 機器を使用した後の注意

- ①機器全般に異常がないか確認すること。
5. 故障した際は直ちに使用を中止し、適切な表示を行い、修理は専門家にまかせること。

【取扱い上の注意】

1. 本装置を廃棄する場合は、自治体の規則に従い、許可を得た産業廃棄物業者に依頼すること
2. 本装置を譲渡及び中古販売(賃貸)する場合は、譲渡及び中古販売前に必ず製造販売業者へ連絡すること。

【保管方法及び有効期間等】

使用後の機器は清潔にして、高温・多湿に注意し保管すること。

<保管の条件>

- 周囲温度:-10~60℃
- 相対湿度:結露しないこと
- 気圧:700~1060hPa

<耐用期間>

6年[自己認証(当社データ)による]

【保守・点検に係る事項】

1. 使用者は機器の日常及び定期点検を行うこと。
2. 一定期間使用した機器は保守点検を業者に依頼すること。
3. しばらく使用しなかった機器を再使用する際には、使用前に必ず正常に、安全に作動することを確認すること。

【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称等】

製造販売業者 オリオン・ラドセーフメディカル株式会社
電話番号 052-449-2670
製造業者 エア・ウォーター防災株式会社 稲沢工場