

歯08 歯科用石膏及び石膏製品
一般医療機器 歯科用硬質石こう JMDN70897020

** ホールディーストーン

*【形状、構造及び原理等】

本材は、下記成分により構成される。

- 1) 性状：粉末
- 2) 成分：石こう、着色剤、その他
- 3) 色調：ブルー色
- 4) 混水比：水24ml/粉末100g(標準)
- 5) 物理性能：JIST6605による

標準混水比	0.24	
硬化時間	10分	
硬化膨張	0.20%	
圧縮強さ	1時間後	47.1Mpa
	乾燥後	78.5Mpa

*【使用目的又は効果】

歯科技工物を作製するために模型材等に用いる硬質石こうをいう。

*【使用方法等】

- 1) 混水量は粉末100gに対して水24mlが標準です。
- 2) 練和時間は30～60秒間、むらなく均一に練和してください。
- 3) スパチュラや筆などで薄く(約2mm)均一に、ろう義歯にコーティングしてください。
- 4) 硬化後の石こうを水で濡らすと、三次埋没の普通石こうは流れ易くなります。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
 - ・本材を扱う際(硬化体を研削する場合も含む)には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
 - ・本材の硬化体を研削する際には、目の損傷を防ぐために、保護めがねなどを使用すること。
 - ・本材は、添付文書に記載の用途以外には使用しないこと。
 - ・本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 2) 重要な基本的注意
 - ・本材が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合は、すぐに大量の水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。
 - ・本材の使用により、発疹や皮膚炎など過敏症状が表れた場合は使用を中止し、医師の診断を受けること。

*【保管方法及び有効期間等】

- 1) 貯蔵・保管方法
 - ・本材は、高温・多湿の場所を避けて保管すること。
 - ・開封後は、チャックを密閉して保管すること。または、密閉容器などに移し替え、乾燥状態にて保管すること。
 - ・本材は、歯科医療有資格者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

2) 有効期間・使用期限

- ・本材は、包装に記載の使用期限[※]までに使用すること。
[記載の使用期限は自己認証(当社データ)による]
※(例：“09.08”とは、使用期限2009年8月末日を示す)

*【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：オーディック株式会社
住 所：〒553-0003
大阪府大阪市福島区福島7-14-20
大阪みづほビル内
電 話 番 号：06-6451-7385
受 付 時 間：9:00～17:00(土・日・祝を除く)