

**ピットリストーン

*【形状、構造及び原理等】

本材は、下記成分により構成される。

- 1) 性状：粉末
- 2) 成分：石こう、着色剤、その他
- 3) 色調：ブライトイエロー色
- 4) 混水比：水24ml/粉末100g(標準)
- 5) 物理性能：JIST6605Iによる

標準混水比		0.24
硬化時間		7分
硬化膨張		0.07%
圧縮強さ	1時間後	42.0MPa
	乾燥後	83.0MPa

2) 有効期間・使用期限

- ・本材は、包装に記載の使用期限[※]までに使用すること。
[記載の使用期限は自己認証(当社データ)による]
※(例：“09.08”とは、使用期限2009年8月末日を示す)

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：オーディック株式会社

住所：〒553-0003

大阪府大阪市福島区福島7-14-20

大阪みづほビル内

電話番号：06-6451-7385

受付時間：土日祝を除く9:00～17:00

(受付16:30終了)

*【使用目的又は効果】

歯科技工物を作製するために模型材等に用いる硬質石こうをいう。

*【使用方法等】

- 1) 混水量は粉末100gに対して水24mlが標準です。
- 2) 練和時間は50～70秒間、むらなく均一に練和してください。
- 3) 印象に注入後、アルジネート印象材では約30分、ラバーベース印象材では約45分で模型を取り出すことができます。

【使用上の注意】

1) 使用注意

- ・本材を扱う際(硬化体を研削する場合も含む)には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- ・本材の硬化体を研削する際には、目の損傷を防ぐために、保護メガネなどを使用すること。
- ・本材は、添付文書に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

2) 重要な基本的注意

- ・本材が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合は、すぐに大量の水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。
- ・本材の使用により、発疹や皮膚炎など過敏症状が表れた場合は使用を中止し、医師の診断を受けること。

*【保管方法及び有効期間等】

1) 貯蔵・保管方法

- ・本材は、高温・多湿の場所を避けて保管すること。
- ・開封後は、密閉容器などに移し替え、乾燥状態にて保管すること。
- ・本材は、歯科医療有資格者以外が触れないように適切に保管・管理すること。