

一般医療機器 歯09 歯科用研削材料  
歯科用ゴム製研磨材 JMDN70903000

## クレバーホイール

### 【形状、構造及び原理等】

本品は、下記成分により構成される。

- 1) 形状：円形プレート状(外径25×内径1.7×厚さ3mm)
- 2) 成分：炭化珪素、その他
- 3) 色調：灰色

### \*\*【使用目的又は効果】

ゴム基材で結合された様々な研磨成分から成る歯科用研磨材をいう。ポイント、ホイール、ディスク等を含む。

### \*\*【使用方法等】

通法に従い、マンドレルに取付けた後、歯科用駆動装置及びハンドピース又は歯科技工用回転機器に装着して使用する。

### 【使用上の注意】

- 1) 使用注意
  - ・使用前にハンドピースメーカーの指示に従い、マンドレルの軸を確実に奥まで挿入してチャックがしっかり噛んでいることを必ず確認すること。
  - ・使用前に予備回転を行い、振れが無いことを確認すること。
  - ・本品を使用する際は、目の損傷を防ぐために保護用眼鏡等の防具を着用すること。
  - ・局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用し、粉塵を吸入しないこと。
  - ・本品は、添付文書に記載の用途以外に使用しないこと。
  - ・本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 2) 重要な基本的注意
  - ・損傷、変形のあるものは、絶対に使用しないこと。
  - ・17,000rpm以下の使用回転数を厳守すること。
  - ・無理な角度、過度の加圧状態で使用しないこと。
  - ・回転中は、身体や衣服にふれないよう注意すること。

### \*\*【保管方法及び有効期間等】

貯蔵・保管方法

- ・本品は、高温、多湿の場所を避けて保管すること。
- ・本品は、歯科医療有資格者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

### \*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

\* 製造販売元：オーディック株式会社

住 所：〒553-0003  
大阪府大阪市福島区福島7-14-20  
大阪みづほビル内

電話番号：06-6451-7385

受付時間：9:00～17:00(土・日・祝を除く)