

サンドビーズGO

【形状、構造及び原理等】

本品は、下記成分により構成される。

- 1) 形状 : 細粒状
- 2) 成分 : ガラス
- 3) 色調 : 白色

** 【使用目的又は効果】

サンドブラスター用の研磨材で、補綴物の研磨に用いる。

** 【使用方法等】

- * 1) キャップを開き、サンドブラスターの研磨材補充部に、
本材をこぼさないように注意しながら補充する。
- 2) 通法の歯科技工操作に従い、サンドブラスターによる
研磨作業を行なう。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
 - ・ 本材の補充、または使用時には、粉塵による人体
への影響を避けるため、局所集塵装置、公的機関
が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入し
ないこと。
 - ・ 本材の補充、または使用時には、目の損傷を防ぐ
ために保護用眼鏡等の防具を着用すること。
 - ・ 本材は、添付文書に記載の用途以外に使用しないこ
と。
 - ・ 本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
 - * 本材は、湿気により固まる事があるので、補充後は
袋内の空気をできるだけ抜き、しっかりキャップを
閉めて保管すること。
 - * 袋内の乾燥材がキャップロを塞ぎ、本材が出にくく
なる恐れがあります。
- 2) 重要な基本的注意
 - ・ 本材が目に入らないように注意すること。万一目
に入った場合は、こすらずに大量の水で洗浄し、
眼科医の診断を受けること。

** 【保管方法及び有効期間等】

貯蔵・保管方法

- ・ 本材は、高温・多湿の場所を避けて保管すること。
- ・ 本材は、歯科医療有資格者以外が触れないよう適
切に保管・管理すること。
- ・ 各袋に乾燥剤入り

** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元 : オーディック株式会社

住 所 : 〒553-0003

大阪府大阪市福島区福島7-14-20

大阪みづほビル内

電 話 番 号 : 06-6451-7385

受 付 時 間 : 9:00~17:00(土・日・祝を除く)