

歯09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科技工用アブレイブ研削器具 JMDN70901000

サンドビーズAB

【形状、構造及び原理等】

本品は、下記成分により構成される。

- 1) 形状: 細粒状
- 2) 成分: アルミナ
- 3) 色調: 茶褐色

**【使用目的又は効果】

アルミナを用いたサンドブラスター用の技工用研削材。

**【使用方法等】

- *1) キャップを開き、サンドブラスターの研削材補充部に、
本材をこぼさないように注意しながら補充する。
- 2) 通法の歯科技工操作に従い、サンドブラスターによる
研削作業を行なう。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
 - ・本材の補充、または使用時には、粉塵による人体
への影響を避けるため、局所集塵装置、公的機関
が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入し
ないこと。
 - ・本材の補充、または使用時には、目の損傷を防ぐ
ために保護用眼鏡等の防具を着用すること。
 - ・本材は、添付文書に記載の用途以外に使用しないこ
と。
 - ・本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
 - * 本材は、湿気により固まる事があるので、補充後は
袋内の空気をできるだけ抜き、しっかりキャップを
閉めて保管すること。
- 2) 重要な基本的注意
 - ・本材が目に入らないように注意すること。万一目
に入った場合は、こすらずに大量の水で洗浄し、
眼科医の診断を受けること。

**【保管方法及び有効期間等】

貯蔵・保管方法

- ・本材は、高温・多湿の場所を避けて保管すること。
- ・本材は、歯科医療有資格者以外が触れないよう適
切に保管・管理すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元: オーディック株式会社

住 所: 〒553-0003

大阪府大阪市福島区福島7-14-20

大阪みづほビル内

電 話 番 号: 06-6451-7385

受 付 時 間: 9:00~17:00(土・日・祝を除く)