

DSカルマS

*【警告】

＜一般的な警告＞

- 1、本機の実作中は、槽内部やDSフラスコを素手で触らないこと。また、熱処理の終了したDSフラスコを取り出す時など、高温部に触れる場合は、必ず乾いた軍手を着用すること。[やけどの原因になるため]
- 2、表示の仕様で使用するこ。また、本機のカバーやねじは外さないこと。[火災、感電、事故の原因になるため]

**＜併用医療機器と専用材料＞

- 1、専用材料の中でも、『DSガードストーンL』と『DSレジン』は必須材料であり、最低必要条件であるため、他の製品で代用してはならない。[完成義歯の品質と品位に影響が出たり、患者の健康を損ねる可能性があるため。]
[【使用方法等】1)●DSシステム“必須材料”の項参照]

**＜操作に関する警告＞

- 1、本機を安全に使用するために、本機付属の取扱説明書とDSシステムに付属のDSガイドブックを必ず読み厳守すること。また、複数人で使用する場合は、指導を行い、安全に正しく使用できることを確認してから使用させること。

*【使用目的又は効果】

歯科技工室で、高分子材料を重合するために用いる加熱装置で、蓄熱を利用し重合を行う。

*【使用方法等】

** 1) 組み合わせて使用する併用医療機器と専用材料

●DSシステム“必須材料”

販売名/用途	医療機器届出番号
DSレジン/ 特殊製法のDSシステム専用レジン	20700BZZ00689A01
DSガードストーンL/ DSシステム専用の1・3次埋没材	27B3X00046000029

●併用機器

販売名/用途	医療機器届出番号
DSセリオS/自動レジン注入器	27B3X00046000026
DSレスタS/自動レジン温度管理器	—

●併用器具

販売名/用途	医療機器届出番号
DSフラスコ/埋没用フラスコ	27B3X00046000012

●DSシステム専用材料

①チェアーサイド

※オーディック社製推奨品

販売名/用途	医療機器届出番号
ビットリストーン/ 膨張率0.07%の低膨張模型用硬質石膏	27B3X00046000005
ユッタリストーン/ 膨張率0.32%の高膨張模型用硬質石膏	27B3X00046000006

②ラボサイド

※オーディック社製推奨品


販売名/用途	医療機器届出番号
ホールディーストーン/2次埋没材	27B3X00046000004
DSワックスブルー/ワックスブルー	27B3X00046000007
DSレジンセパ/レジン分離剤	—
ストーンセパ/石膏分離剤、他	—

*【形状、構造及び原理等】

1)装置外観図

本体寸法：幅283×奥行321×高さ528mm

本体重量：20.5kg

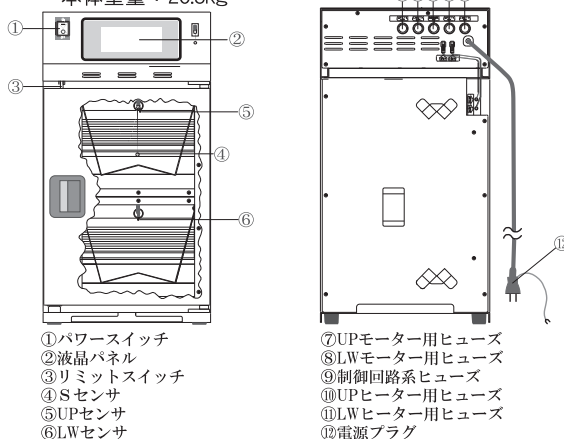

2)動作原理

④～⑥のセンサで検出したデータを算出し、ヒータをプログラム制御することで、高分子材料の加熱重合環境を具現化する。

3)電氣的定格

定格電圧：AC100V 定格消費電力：640W
定格周波数：50/60Hz
周囲温度：-5～60℃(凍結なきこと)

2)設置方法、組立方法

- ①本機の取付、設置は、当社専門のスタッフまたは、当社指定業者が行う。
- ②傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)などに対する安定状態に注意し、設置すること。

3)使用方法

付属の取扱説明書とDSシステムに付属のDSガイドブックを使用前に必ずお読みください。

- ①電源プラグを差込み、パワースイッチを押して電源を入れる。
- ②扉を開き上槽部に粘膜側面側フラスコを、下槽部に人工歯側面側フラスコをセットする。その際、粘膜側面側フラスコの1つにSセンサを差込み、扉を閉める(あらかじめ一次埋没石膏面に穴をあけておく)。
- ③液晶パネルに表示されている「スタート」を押す。
- ④液晶パネルに「レジン混和お知らせ画面」が表示されると同時にチャイムが鳴るので、1度だけ「確認ボタン」を押す。
- ⑤「熱処理完了画面」が表示されると同時にチャイムが鳴るので、1度だけ「確認」を押す。
- ⑥扉を開き、フラスコを上下1組になるように取り出して閉輪し、餅状レジンを注入する。
- ⑦パワースイッチを押し、電源を切る。

取扱説明書とDSガイドブックを必ずご参照ください。

器 6 9 歯科用蒸和器及び重合器
一般医療機器 歯科技工用重合装置 JMDN 3 5 7 6 1 0 0 0

DSカルマS

*【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- ・本機を扱う際は、落下による破損と人体への影響を避けるため、平らで安定した場所で操作を行うこと。
 - ・本機使用中は、電源プラグを抜かないこと。
 - ・本機使用中は、本体を動かしたり衝撃を加えたりしないこと。
 - ・本機はDSシステム専用ですので、本機の破損と人体への影響を避けるため、DSシステム専用器材以外は使用しないこと。
 - ・本機は、添付文書に記載の用途以外に使用しないこと。
 - ・本機は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ※本機の詳細な注意事項については、付属の取扱説明書P2～P3に記載の「安全上のご注意」の項を使用前に必ず読むこと。

*【保管方法及び有効期限等】

1)貯蔵・保管方法

- ・本機は、湿度・ほこり・水のかからない場所に保管すること。
- ・本機は、歯科医療有資格者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

2)耐用期間

製造出荷後、正規の保守点検を行った場合に限り、7年間(自己認証による)。

*【保守・点検に係る事項】

注意：弊社指定のサービス技術者以外による機器内部の改造を行わないこと。カバーを外したり機器内部の部品に触れたりしないこと。

[業者による保守点検事項]

本機は1500時間使用することにより点検をお受けいただく「定期点検制度」を導入しております。

※最速コースを頻繁に使用される場合は、初回の点検を含め800時間で点検に出されることをおすすめします。

たとえ本機に異常がなくても、点検時期が近づきましたらお買上げの販売店、または下記メンテナンス窓口までご連絡のうえ、点検をお受けください。

メンテナンス窓口：オーディック㈱

電話番号：06-6451-7385

** 受付時間：土・日・祝を除く9:00～17:00
(受付16:30終了)

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：オーディック㈱

住所：〒553-0003

大阪府大阪市福島区福島7-14-20

大阪みづほビル内

電話番号：06-6451-7385

** 受付時間：土・日・祝を除く9:00～17:00
(受付16:30終了)

取扱説明書とDSガイドブックを必ずご参照ください。