

一般医療機器

歯09 歯科用研削材料
歯科用研磨器材

JMDN70907000

ミニモンスター

【形状、構造及び原理等】

1) 装置外観図

本体寸法：W28.5×D29.6×H39.8mm
(集塵ホースの寸法は含まず)

本体重量：5.6kg (研磨材含まず)

付属ノズル (どちらか1種類)

13 口径
φ2.6mm

14 口径
φ3.2mm

番号	名称
①	窓用フィルム
②	サンドグローブ(左のみ)
③	電源スイッチ
④	ダストプレート
⑤	排気口
⑥	扉
⑦	扉ツマミ

番号	名称
⑧	開閉コック(閉の状態)
⑨	エアホース接続口
⑩	電源ソケット
⑪	エアフィルターセット(別売品取付穴)
⑫	電源コード
⑬	固定ノズル S
⑭	固定ノズル L

- 2) 原理
- 本機器は、圧縮空気を利用しノズルから研磨材を噴射することにより、補綴物の研磨及び研削、埋没材の除去を行う機器である。
詳細は取扱説明書を参照すること。
- 3) 仕様
- 定 格 電 圧：AC100V、50/60Hz
定格消費電力：7W
最高使用圧力：0.8MPa
使用環境温度：5～40℃
- 4) 別売品
- ミニモンスター用エアフィルターセット

【使用目的又は効果】

歯科技工物製造過程での技工物の表面処理や、酸化皮膜、石膏・埋没材の除去に用いる研削機器である。

- 【使用方法等】
- 1) 設置方法、組立方法
- ・添付の取扱説明書に従い販売業者が行う。
- ・傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)などに対する安定状態に注意し、設置すること。

- 2) 使用方法
- 詳細については取扱説明書の【使用方法】を使用前に必ず参照すること。
- ①電源を入れる。
- ②右側面の『扉ツマミ』を手前に90°回転させ『扉』を開き、ブラスト処理する補綴物を作業室に入れたのち、『扉』を閉め、『扉ツマミ』を押し込みながら奥に90°回転させ『扉』をロックする。
- ③左側面の『サンドグローブ』に手を入れる。
- ④ブラスト処理する補綴物を『サンドグローブ』でつかみ、『固定ノズルL』に近づけ、『開閉コック』※を手前に回せばブラスト処理開始。
※『開閉コック』の開き具合で、吐出するサンドビーズの量を調整できるので、ブラスト処理しながらパワー調整が可能。
- ⑤電源を切る。

【使用上の注意】

詳細については取扱説明書の【使用方法】を使用前に必ず参照すること。

- [重要な基本的注意]
- ・本機を扱う際は、落下による破損と人体への影響を避けるため、平らで安定した場所で操作を行うこと。
- ・本機使用中は、本体を動かしたり衝撃を加えたりしないこと。
- ・本機は、添付文書の【使用目的又は効果】に記載の用途以外に使用しないこと。
- ・本機は、歯科医療有資格者以外は使用はしないこと。
- ・本機は使用前に取扱説明書、および添付文書をよく読み、正しく使用すること。

【保管方法及び有効期限等】

高温多湿な場所を避け、ほこり・水のかからない場所に保管すること。

【保守・点検に係る事項】

詳細は取扱説明書を参照すること。

- [使用者による保守点検事項]
- ・作業室内の清掃を日常のお手入れとして、使用前または定期的に作業室内に溜まったダストは排出すること。

- [別売品のエアフィルターを付けた場合]
- ・エアフィルターに溜まった異物・油水分は適時除去する。
- ただし、頻繁に溜まる場合は、別途エアドライヤを設置するなどの対策を施すこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：オーディック株式会社

住 所：〒553-0003
大阪府大阪市福島区福島7-14-20
大阪みづほビル内

電 話 番 号：06-6451-7385

受 付 時 間：土・日・祝を除く9:00～17:00(受付16:30終了)

取扱説明書を必ずご参照ください。