

歯科材料 9 歯科用研削材料
歯科用研磨器材・一般医療機器 70907000

ミニコーン

【形状・構造等】

先端部：研磨紙巻き上げ成形

形状 円錐形

粒度 (J I S 研磨紙による)

荒 (黄)： 1 8 0 番

中 (青)： 2 4 0 番

細 (赤)： 3 2 0 番

極細 (黒)： 4 0 0 番

軸 部：ステンレス

【性能、使用目的、効能又は効果】

用途

歯科技工用。義歯等の研磨。

【操作方法又は使用方法等】

付属の専用二又軸にはめ込み、しっかり固定し使用する。

[使用方法に関連する使用上の注意]

別売にて滑脱の心配のないねじ長 1 2 mm のスクリュー軸もあり、ねじ込み、しっかり固定し使用する。

【使用上の注意】

- ①二又軸はハンドピースに確実に固定し、回転振れのないことを確認すること。
- ②回転中に無理な力を加えず、ソフトタッチで使用する。
- ③20,000回転以下で使用する。
- ④逆回転で使用しない。
- ⑤研磨作業の際には安全のため保護眼鏡、防塵マスクなどを使用すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

素材の特性により湿気に弱いため、特に開封後は防湿保管する。

【包装】

6 0 粒／函 (混合は 荒 5：中 2 5：細 2 5：極細 5)

ミニコーン専用ステンレス二又軸 1 本付属

【製造業者又は輸入販売業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元 大木化学工業株式会社

住所：〒733-0032

広島市西区東観音町1番16号

電話番号：082-231-0808