

歯科材料 9 歯科用研削材料
歯科用研磨器材・一般医療機器 70907000

ループコーン

【形状・構造等】

先端部：研磨紙巻き上げ成形

形状 円錐形

粒度 (J I S 研磨紙による)

荒 (黒) : 100番

中 (青) : 150番

細 (赤) : 240番

軸 部：スチールニッケルメッキ

【性能、使用目的、効能又は効果】

用途

歯科技工用。義歯等の研磨。金属等の固い素材の研磨。

乾性潤滑剤塗布の研磨紙使用のため、目詰まりしにくく、発熱しにくい。

【操作方法又は使用方法等】

付属の専用スクリュー軸にねじ込み、しっかり固定し使用する。

【使用上の注意】

- ①軸はハンドピースにしっかりと固定し、回転振れのないことを確認すること。
- ②回転中に無理な力を加えないこと。
- ③10,000回転以下で使用する。
- ④逆回転で使用しないこと。
- ⑤研磨作業の際には安全のため保護眼鏡、防塵マスクなどを使用すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

素材の特性により湿気に弱いいため、特に開封後は防湿保管する。

【包装】

荒 20粒／函

中 30粒／函

細 30粒／函

混合 25粒 (荒5：中10：細10)／函

専用スクリュー軸 1本付属

【製造業者又は輸入販売業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元 大木化学工業株式会社

住所 : 〒733-0032
広島市西区東観音町1番16号

電話番号 : 082-231-0808