

歯科材料 9 歯科用研削材料
歯科用研磨器材・一般医療機器 70907000

ソリッドシリンドラ

【形状・構造等】

先端部：研磨紙巻き上げ成形

形状 円錐形

粒度（J I S 研磨紙による）

荒（黒）： 1 0 0 番

中（青）： 1 5 0 番

細（赤）： 2 4 0 番

極細（黄）： 3 2 0 番

軸 部：スチールニッケルメッキ

【性能、使用目的、効能又は効果】

用途

歯科技工用。義歯等の研磨。金属等の固い素材の研磨。

乾性潤滑剤塗布の研磨紙使用のため、目詰まりしにくく、発熱しにくい。

【操作方法又は使用方法等】

付属の専用スクリュー軸にねじ込み、しっかり固定し使用する。

【使用上の注意】

- ①軸はハンドピースにしっかりと固定し、回転振れのないことを確認すること。
- ②回転中に無理な力を加えないこと。
- ③10,000回転以下で使用する。
- ④逆回転で使用しないこと。
- ⑤研磨作業の際には安全のため保護眼鏡、防塵マスクなどを使用すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

素材の特性により湿気に弱いため、特に開封後は防湿保管する。

【包装】

3 0 粒／函（混合は荒 5：中 1 0：細 1 0：極細 5）

専用スクリュー軸 1 本付属

【製造業者又は輸入販売業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元 大木化学工業株式会社

住所：〒733-0032

広島市西区東観音町1番16号

電話番号：082-231-0808