

＊ ＊ 2023 年 2 月作成(第 6 版)

＊ 2017 年 8 月作成(第 5 版)(新記載要領に基づく改訂)

届出番号 13B2X10098000002

医 04 整形用品

一般医療機器 医療用不織布 JMDN コード 34655000

デンタル・ガーゼ EOG 滅菌済

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと

【形状・構造及び原理等】

素材: キュブラ100%不織布

素材化学式: $(C_6H_{10}O_5)_n$

性状: 15cm × 10cm 6 折の白色不織布ガーゼ

【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を処置する為に用いる。

【使用方法等】

- ・開封後直ちに使用してください。
- ・単回使用。

【使用上の注意】

- ・体内に留置しないこと。
- ・開封後は、滅菌状態を保てないため、早めに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

・滅菌保証期間は製造日から 3 年。

(最終有効年月は別枠に記載)

・直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】＊ ＊

製造販売元: 小津産業株式会社

〒103-8435 東京都中央区日本橋本町 3-6-2

発売元: 株式会社ヨシダ

〒110-8507 東京都台東区上野 7-6-9

TEL 0800-170-5541 (コンタクトセンター)

※対応時間/月～金 9:00～17:30 土 9:00～17:00

(日曜・祝日を除く)