

**2026 年 1 月(第 4 版)

*2017 年 10 月(第 3 版)(新記載要領に基づく改訂)

*届出番号 13B2X10098000003

医 04 整形用品

一般医療機器 医療用不織布 34655000

ナビガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 未滅菌のものを創傷面に使用しないこと
- 体内に留置しないこと

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元及び製造元

小津産業株式会社

〒103-8435 東京都中央区日本橋本町 3 丁目 6 番 2 号

TEL:03-3661-9564

【形状・構造及び原理等】

素材:キュブラ100%不織布

形状:白色不織布ガーゼ

規格: M 25cm×25cm 4 折

S 7.1cm×7.5cm 12 プライ

**販売元／問い合わせ先

アズワン株式会社

〒550-8527 大阪市西区江戸堀 2 丁目 1 番 27 号

カスタマー相談センター TEL:0120-711-875

受付時間:午前 9 時～12 時、午後 1 時～5 時 30 分

(土・日・祝日及び会社休業日は除く)

【使用目的又は効果】

創傷面又は外科切開部を処置するために用いる不織布からなる被覆・保護材をいう。

【使用方法等】

**・滅菌して適宜使用すること。滅菌は、オートクレーブ滅菌、EOG 滅菌ができる。

・単回使用

【使用上の注意】

＜使用上の注意＞

- ・滅菌に際しては滅菌器の取扱い説明書に従って操作すること
- ・滅菌バッグ又はカストに入れて滅菌すること