

2009 年 5 月 1 日作成（第 3 版）＊

2006 年 4 月 1 日作成（新様式第 1 版）

＊製造販売届出番号 13B2X10098000012

一般医療機器 医 04 整形用品 医療用不織布 JMDN コード 34655000

GCワイプ

再使用禁止

（未滅菌）

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 未滅菌のものを創傷面に使用しないこと。
- 体内に留置させないこと。

【形状・構造等】

- 素材：キュプラ 100%不織布
- 素材化学式： $(C_6H_{10}O_5)_n$

【使用目的・効能又は効果】

- 創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護。

【操作方法又は使用方法等】

- 衛生材料として適宜滅菌して使用すること。
- 滅菌はオートクレーブ滅菌、EOG滅菌ができる。

【品目仕様】

- 泡立ち 10 分以内に消えること。
- pH 試験液と空試験液との pH の差は 3.0 以下。
- 過マンガン酸カリウム還元性物質
試験液と空試験液の過マンガン酸カリウムの消費量の差は 3.0ml 以下。
- 蒸発残留物 試験液と空試験液の残留物の差は 20mg 以下。
- 蛍光増白剤 全面に染着された蛍光を認めない。

【使用上の注意】

- 単回使用
- 火気の近くには置かない。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- 小児の手に届かないところに保管すること。

【包装】

- 内容量及び単位
200枚

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

- 【製造販売元】小津産業株式会社
〒103-8435 東京都中央区日本橋本町 3-6-2
お問い合わせ 06-6226-4184
- 【製造元】株式会社旭小津
- 【販売元】株式会社長谷川綿行
〒481-0013 愛知県北名古屋市師勝町大字二子字四反地 977-2