

**2015年10月5日(第3版)(新記載要領に基づく改訂含む)

*2009年5月1日(第2版)

届出番号 13B2X10098000015

医 04 整形用品

一般医療機器 医療用不織布 34655000

トラクロス

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 未滅菌のものを創傷面に使用しないこと
- 体内に留置しないこと

【保管方法及び有効期間等】

<貯蔵・保管方法>

直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【形状・構造及び原理等】

素材:レーヨン100%不織布

形状:白色不織布ガーゼ

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元及び製造元

小津産業株式会社

〒103-8435 東京都中央区日本橋本町3丁目6番2号

メディカルサプライ担当 TEL.03-3661-9564

*【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を処置する為に用いる不織布から成る被覆・保護材をいう。

発売元

株式会社竹虎

URL <http://taketora-web.com/>

商品に関するお問い合わせ先フリーダイヤル 0120-094-315

【使用方法等】

- ・使用目的に応じ、適宜使用する。
- ・創傷面には滅菌して使用する。
- ・滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。

【使用上の注意】

<使用上の注意>

- ・使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理すること。
- ・滅菌バッグ又はカストに入れて滅菌すること。

<重要な基本的注意>

- ・未滅菌のものを創傷面に使用しないこと。
- ・体内に留置しないこと。