

医 04 整形用品

一般医療機器 医療用不織布 JMDNコード 34655000

ナビガーゼ DENTAL 未滅菌

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・未滅菌のものを創傷面に使用しないこと
- ・体内に留置しないこと

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元:小津産業株式会社

〒103-8435 東京都中央区日本橋本町3-6-2

メディカルサプライ担当 Tel 03-3661-9564

【形状・構造及び原理等】

本品は、キュブラ繊維 100%からなる不織布を、裁断、折りたたんだ布状製品である。

【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる。

発売元:アズワン株式会社

〒550-8527 大阪市西区江戸堀2丁目1番27号

問合せ窓口

カスタマー相談センター TEL 0120-711-875

【使用方法等】

- ・適宜滅菌して使用すること。
- ・滅菌は、高圧蒸気滅菌、EOG 滅菌ができる。

【使用上の注意】

- ・開封後は早めに使用すること。
- ・滅菌して使用する場合は、滅菌バック又はカストに入れて滅菌すること。再滅菌はしないこと。