

## 機械器具 16 体温計 管理医療機器

一般的名称: 電子体温計(14032010)

オーム電子体温計 Mr. Check MT-219-BWC


## 【警告】

- (1) お子様だけで扱わないでください。  
 ※電池誤飲事故や感温センサー部で目を突くなど  
 思わぬ事故の恐れがあります。  
 (2) 本体を強くかじらないでください。

## 【禁忌・禁止】

- (1) 分解、改造、修理は絶対にしないでください。  
 (2) 火気や熱気のあるそばでは使用しないでください。  
 (3) 人の体温測定以外に使用しないでください。  
 ※お風呂に浸けたりしますと故障の原因になります。

## 【形状・構造及び原理等】

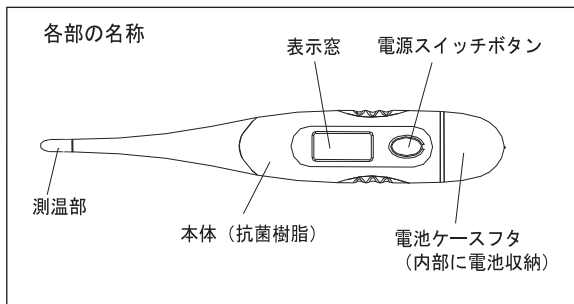

付属品: 収納ケース, 取扱説明書

電池(LR41またはGP192) 1個 (本体に内蔵)

## 動作原理

本器は感温部内にあるサーミスタが温度により電氣的抵抗値が変化する特性を応用し、抵抗値の変化を発信回路を経て、周波数に変換しその周期を電子回路で演算処理し、体温として液晶表示部にデジタル表示しています。

電 源: DC1.5V (アルカリボタン電池使用)

測定範囲: 32.0℃～42.9℃

測定精度: ±0.1℃

表示方式: 液晶表示素子による3桁デジタル表示

使用条件: 周囲温度10℃～40℃

保存条件: 周囲温度-20℃～60℃ 湿度95%以下

寸 法: 長さ130.5×幅19.0×厚さ11.1mm

重 量: 9.7g (電池込み・本体重量)

電撃保護: 内部電源機器 B形

そ の 他: 前回測定温度のメモリー機能

ブザーによるお知らせ機能

電池消耗表示機能

電源切り忘れ防止機能

## 【使用目的又は効果】

本器は感温部に内蔵された感温素子（サーミスタ）により、人の体温を測定しデジタル表示する電子体温計です。

## 【使用方法等】

- (1) 電源スイッチボタンを約1秒間押します。  
 (2) “ピー”音の後に液晶表示部の全セグメントが表示されます。その後液晶表示部の右下部に“M”が表示され、前回測定の温度が2秒間表示されます。  
 (3) その後、“℃”の点滅が開始し、測定可能になります。  
 (4) 測温部を舌下又は腋下に密着させ安静にします。

- (5) “ピー・ピー”音が連続10秒間鳴ったら測定が終了に近づいた合図です。(体温を正確に測定するためにはさらに舌下で2分、腋下で3分以上続けて測定してください。)  
 (6) 表示窓に測定された体温が表示されています。  
 (7) 測定が終わりましたら、電源スイッチボタンを押せば、表示が消え、電源がOFFになります。  
 電源スイッチボタンを押さなかった場合は、自動的に電源がOFFになります。(ONしてから約9分後)  
 (8) 感温部及び本体を乾いた布等で水気を拭きとってから保管ケースへ収納してください。  
 ・詳細は取扱説明書をお読みください。

## 【使用上の注意】

- (1) 小さなお子様の手の届かないところで保管してください。また、お子様にご使用の際は先端のセンサー部で、目を突付いたり電池を誤飲しないよう保護者の監視下でご使用ください。  
 (2) 運動・食事・入浴の後は、十分な時間をおいてから体温を測定してください。  
 (3) 舌下温を測定するときは、指定する場所に挿入し測定中は動かさないでください。  
 また、本体を強く噛まないでください。  
 (4) 体温以外の測定に使用しないでください。

## 【保管方法及び有効期間等】

- (1) 高温や直射日光のあたる場所、湿気の多い場所や水のかかる場所、ほこりの多い場所、腐食性のガスの発生する場所に保管しないでください。  
 (2) 保管ケースに入れて保管してください。

## 【取扱い上の注意】

- (1) 分解・改造・修理は絶対に行わないでください。  
 (2) 電池ケース部分は防水性がありません。電池ケース部に水等をかけたり、本体を水等につけたりしないでください。  
 (3) 熱湯消毒はしないでください。  
 (4) 超音波洗浄はしないでください。  
 (5) 極端に曲げたり、落としたり強い衝撃を与えないでください。  
 (6) 体温を測定するとき周囲温度が体温より高いような場合は、センサー部に水をかけ、先端を冷やしてから測定し、終了のお知らせ音が鳴ったらすぐに表示値を読み取ってください。  
 (7) 電池が消耗した場合、温度表示窓の右下部に ■ マークが表示されます。  
 このような場合は、電池を交換してください。

## 【保守・点検に係る事項】

- (1) 長期間使用しなかったときは、使用前に清潔な状態にし、点検（電源が入る等）をしてから使用してください。  
 (2) 汚れは、中性洗剤又はアルコールをしみ込ませた布でよく拭いてください。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名: 株式会社オーム電機

電話 048-992-2735

外国製造所: VEGA TECHNOLOGIES INC. (CHINA)

取扱説明書を必ずご参照ください。