

WA33027A ダイレーター 9～28Fr.

*【禁忌・禁止】

併用医療機器

医療用潤滑剤は非導電性のものを使用しないこと。[高周波処置を行う際に、熱傷の危険性がある。]

【形状・構造及び原理等】


構造・構成ユニット

1.構成

本添付文書は次の構成品目を扱う。
WA33027A ダイレーター9～28Fr.

2.各部の名称

★は、使用中体腔内組織に触れる部分である。

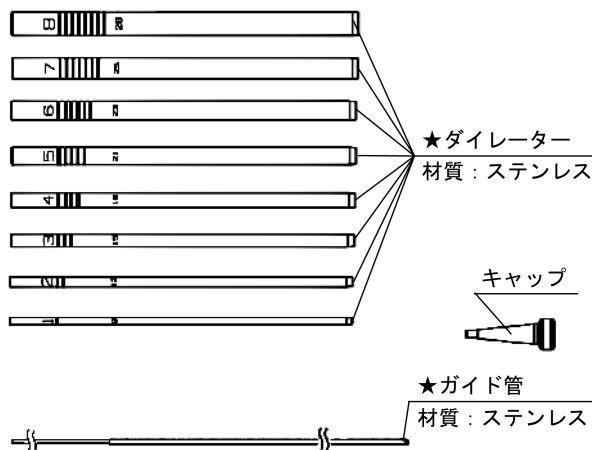

*3.仕様

製品番号	挿入部最大径	チャンネル最小径	有効長
1	Φ3mm (9Fr.)	Φ2.45mm	245.8mm
2	Φ4mm (12Fr.)	Φ3.05mm	246.2mm
3	Φ5mm (15Fr.)	Φ4.05mm	246.4mm
4	Φ6mm (18Fr.)	Φ5.05mm	246.7mm
5	Φ7mm (21Fr.)	Φ6.05mm	247.1mm
6	Φ7.75mm (23Fr.)	Φ7.05mm	247.1mm
7	Φ8.45mm (25Fr.)	Φ7.80mm	247.3mm
8	Φ9.50mm (28Fr.)	Φ8.50mm	247.8mm
ガイド管	Φ2.42mm	Φ1.2mm	600mm (全長)

作動・動作原理

経皮的に体腔に挿入したガイド管に、ダイレーターを径の小さなものから順次かぶせていくことにより、徐々に瘻孔を形成・拡大できる。

*【使用目的又は効果】

使用目的

内視鏡器具を経皮的に体腔等に挿入するための瘻孔を形成・拡大する。

*【使用方法等】

使用方法

- 滅菌
適切な方法で滅菌する。
- 挿入
(1)体腔内へ刺入したガイドワイヤーに沿ってガイド管を挿入する。
(2)ガイド管に沿ってダイレーターを順次挿入し、瘻孔を形成・拡大する。必要に応じてルンボナイフを用いて切開する。
- 滅菌
使用後は、「1.滅菌」と同様に滅菌を行う。

使用方法に関する詳細については、本製品の『取扱説明書』の「使用方法」を参照すること。

組み合わせて使用する医療機器

【形状・構造及び原理等】の「3.仕様」に記載の挿入部最大径に適した当社シースを使用すること。

【使用上の注意】

*重要な基本的注意

- 一般的事項
- 本製品を用いた処置は術野が確保された状態で慎重に行うこと。
 - 本製品は出荷時には滅菌していない。初回の使用前に、【保守・点検に係る事項】の指示に従って洗浄、消毒、滅菌すること。
 - 灌流液が血管循環に浸入し、水中毒を起こす可能性があるため、長時間手術を行ったり、血管が開いた状態で水圧を加えないこと。

*不具合

その他の不具合

破損、変形、腐食

*有害事象

その他の有害事象

感染、水中毒、感電、穿孔、出血、組織の炎症、やけど

*【保管方法及び有効期間等】

保管方法

使用後は、本製品の『取扱説明書』に従い、洗浄、消毒、滅菌を行い、保管すること。

耐用期間

本製品の耐用期間は製造出荷後（納品後）5 年である（自己認証（当社データ）による）。なお、この年数は耐用期間内に本添付文書や本製品の『取扱説明書』に示す使用前点検および定期点検を実施し、点検結果によって修理またはオーバーホールが必要な場合にはそれらを実施するなどの適正使用をした場合の年数である。

本製品の取扱説明書およびシステムガイド内視鏡下手術を必ず参照してください。

***【保守・点検に係る事項】

洗浄、消毒、滅菌

1. 毎症例後直ちに、1 本 1 本別々に洗浄、消毒、滅菌を行うこと。
手順および条件は、本製品の『取扱説明書』の記載に従うこと。
また、使用現場から洗浄を行う場所へ運搬時は、付着物を柔らかいガーゼでふき取り、機器を分解して運ぶこと。
2. 本製品の『取扱説明書』に記載の、洗浄、消毒、滅菌に使用できる薬剤を使用すること。それ以外の薬剤については、オリンパスに問い合わせること。
3. 残留液を洗い流す際は滅菌水を使うこと。滅菌水を使用できない場合は、飲料水またはフィルターによって微生物が除去された水を使用すること。
4. 下記の手順で用手洗浄を行うこと。
 - (1) 本製品を水（20℃以下）で洗浄する。
 - (2) 汚れが落ちにくい場合には、医療用で低泡性の中性洗剤を使い、ぬるま湯の中で洗浄する。なお、洗浄時に洗浄液を過度に泡立たせないようにすること。
 - (3) 目視で、付着物がすべて除去されるまで、上記洗浄作業を続ける。
 - (4) 本製品を洗浄した後、滅菌水で洗浄液を洗い流す。
 - (5) 本製品を水切りする。
 - (6) ガーゼなどを使って残っている水をふき取る。
5. 下記の手順で高圧蒸気滅菌を行うこと。
前真空排気工程付き高圧蒸気滅菌装置を使用し、前真空排気工程の後、機器を 134℃で 5 分間高圧蒸気滅菌することを推奨している。また、高圧蒸気滅菌の温度は 138℃を超えないこと。なお、高圧蒸気滅菌可能な当社の製品は、以下の規格に基づいた高圧蒸気滅菌ができる構造になっている。
 - 米国規格 ANSI/AMMI ST46:1993
 - 英国規格 BS 3970
 - 欧州規格 EN 285
 - (1) 本製品を適切な滅菌用トレイに収納し、滅菌用トレイごと滅菌パックに封入後、高圧蒸気滅菌を行う。
 - (2) 高圧蒸気滅菌後、冷水や冷却装置を使わずに室温まで冷却する。温度が急激に変化すると、機器が損傷するおそれがある。
6. 本添付文書および本製品の『取扱説明書』に記載している洗浄、消毒、滅菌方法では、クロイツフェルト・ヤコブ病の病因物質と言われているプリオンを消失もしくは不活化することはできない。クロイツフェルト・ヤコブ病または変異型クロイツフェルト・ヤコブ病患者に本製品を使用する場合は、クロイツフェルト・ヤコブ病または変異型クロイツフェルト・ヤコブ病患者専用の機器として使用するか、使用後に適切な方法で破棄すること。クロイツフェルト・ヤコブ病への対応方法は、種々のガイドラインに従うこと。なお、本製品は、一般に示されている、プリオンを消失もしくは不活化する方法に対する耐久性が全くない、または、十分な耐久性がない。

使用者による保守点検事項

使用前点検および定期点検（6 か月に一度）において、以下の事項を点検すること。点検結果により修理またはオーバーホールを必要であれば実施すること。

1. 製品に、腐食、へこみ、亀裂、曲がり、スリキズがないこと。
2. 洗浄剤や消毒剤が残っていないこと。
3. 不足の部品や緩んでいる部品がないこと。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：

オリンパスメディカルシステムズ株式会社
〒192-8507 東京都八王子市石川町 2951

お問い合わせ先
TEL 0120-41-7149（内視鏡お客様相談センター）

外国製造元：

オリンパス ウィンター アンド イベ社
OLYMPUS WINTER & IBE GMBH
国名：ドイツ連邦共和国

本製品の取扱説明書およびシステムガイド内視鏡下手術を必ず参照してください。