

機械器具 25 医療用鏡 一般医療機器 内視鏡用部品アダプタ JMDN コード 37090010

ディスポーザブルアダプター鉗子栓 MAJ-1414

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】


**構造・構成ユニット

1.構成


・ディスポーザブルアダプター鉗子栓 MAJ-1414

2.各部の名称

・ディスポーザブルアダプター鉗子栓 MAJ-1414

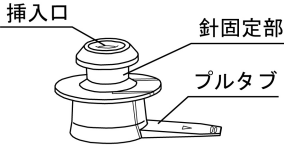

・吸引用針（本製品には含まれていない）

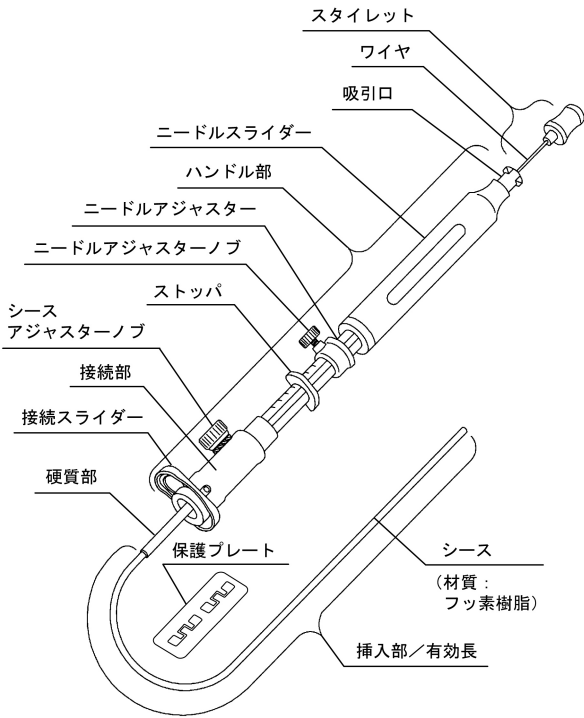

作動・動作原理

本製品は、超音波内視鏡の鉗子栓口金に取り付け、当社指定の吸引用針と組み合わせて使用することにより、気管、気管支および上部消化管の粘膜下や周辺臓器の組織や細胞を吸引採取することができる。

【使用目的又は効果】

使用目的

本品は、気管、気管支、食道およびその周辺臓器の組織や細胞を吸引採取するために、当社指定の吸引用針と組み合わせて、当社指定の超音波内視鏡に取り付けて使用することを目的とする。

【使用方法等】

1.点検

滅菌パックの点検、本製品の外観の点検を行う。

2.内視鏡への取り付け

内視鏡の鉗子栓口金に本製品を取り付ける。

3.吸引用針の内視鏡への挿入

(1)吸引用針を挿入口にゆっくりと挿入する。

(2)吸引用針の操作部（またはハンドル部）が突き当たるまで挿入し、針固定部に吸引用針の接続スライダーをスライドさせて、吸引用針の操作部を接続し、固定する。

*4.穿刺、吸引採取

吸引用針の『電子化された添付文書』および『取扱説明書』に記載されている操作方法に従って、目的の組織または細胞を吸引採取する。

5.吸引用針の内視鏡からの引き抜き

(1)吸引用針の接続スライダーをスライドさせて、吸引用針の操作部との接続を解除する。
(2)吸引用針をゆっくりと内視鏡から引き抜く。

6.内視鏡からの取りはずし

プルタブを引いて内視鏡の鉗子栓口金から本製品を取りはずす。

7.廃棄

本製品は、使用後、適切な方法で廃棄する。

本製品には、吸引用針は含まれていない。

**組み合わせて使用する医療機器

本製品と組み合わせて使用可能な医療機器は以下である。

販売名	医療機器承認番号
超音波気管支ファイバービデオスコープ OLYMPUS BF TYPE UC260F-OL8	21600BZZ00281000

又は同等品

販売名	医療機器認証番号
ディスポーザブル吸引生検針 NA-201SX-4022	21600BZZ00296000

又は同等品

【使用上の注意】

重要な基本的注意

一般的事項

【形状・構造及び原理等】の「3.仕様」に記載されている吸引用針と組み合わせて使用する時には必ず本製品を内視鏡の鉗子栓取付口金へ装着し、内視鏡検査中は取りはずさないこと。

不具合

その他の不具合

機器の破損、機能の低下

有害事象

その他の有害事象

術者・患者の外傷

組み合わせて使用する機器の取扱説明書を必ずご参照ください。

【保管方法及び有効期間等】

有効期間

滅菌パックに表示された使用期限を確認すること。
(自己認証(当社データ)による)

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元:

オリンパスメディカルシステムズ株式会社
〒192-8507 東京都八王子市石川町 2951

お問い合わせ先
TEL 0120-41-7149 (内視鏡お客様相談センター)

組み合わせて使用する機器の取扱説明書を必ずご参照ください。