

サクション ポリープ トラップ MH-14

再使用禁止


【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

構造・構成ユニット

1.各部の名称

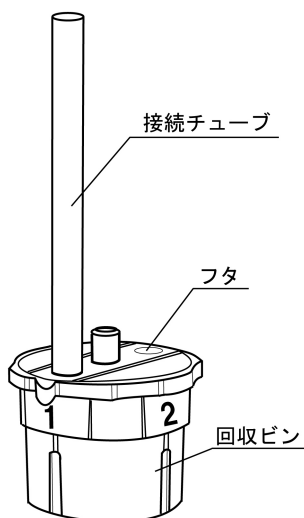

** *2.仕様

接続チューブ長さ : 119.38mm(4.7inch)
フタ直径 : Φ60.9mm

作動・動作原理

内視鏡の吸引口金と吸引器の間に接続し、吸引により経内視鏡的に回収された組織を一時保管できる。

【使用目的又は効果】

使用目的

本品は、内視鏡の吸引口と吸引器の間に接続し、吸引により経内視鏡的に回収された組織を一時保管するために用いる。

*【使用方法等】

使用方法

- 1.回収ビンのフタ中心の突起部を、吸引器につながるチューブにしっかりとつなぐ。
- 2.回収ビンの接続チューブを、内視鏡の吸引口金にしっかりとつなぐ。
- 3.通常の吸引は、フタの矢印を番号がついていない位置に合わせて行う。
- 4.ポリープを回収する際は、フタを回転し、矢印を「1」に合わせて吸引する。
- 5.ポリープの回収が終わったら、フタを反時計回りに回転させ、フタの矢印を番号がついていない位置へ合わせる。
- 6.続けてポリープを回収する際は、矢印をさらに回して順に「2」、「3」、「4」の位置に合わせて吸引する。
- 7.接続チューブを内視鏡の吸引器からはずし、吸引器につながるチューブをフタ中心の突起部からはずす。
- 8.矢印を番号がついていない位置に合わせる。
- 9.使用後は、適切な方法で廃棄する。

使用方法に関する詳細については、本製品の『取扱説明書』の「4 使用法」を参照すること。

使用方法等に関連する使用上の注意

本製品の使用前に目視検査を行い、キズ、汚れ、割れ、曲がり、折れ、脱落などの異常がないことを確認すること。

*【使用上の注意】

重要な基本的注意

一般的事項

吸引でポリープが内視鏡の吸引管路に詰まったときは、洗浄ブラシなどでポリープを先端へ押し出すこと。

不具合

その他の不具合

脱落、破損、変形

有害事象

その他の有害事象

感染

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：

オリンパスメディカルシステムズ株式会社
〒192-8507 東京都八王子市石川町 2951

お問い合わせ先

TEL 0120-41-7149（内視鏡お客様相談センター）

外国製造業者：

ユー エス エンドスコーピー グループ インク
U.S. Endoscopy Group Inc.
国名：アメリカ合衆国

取扱説明書を必ずご参照ください。