


## ライトガイドアダプター MAJ-1413

### 【形状・構造及び原理等】

#### 構造・構成ユニット

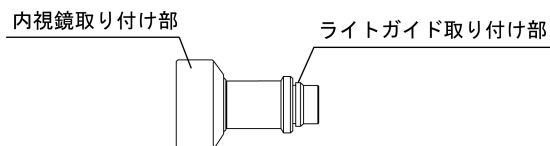

#### 1.仕様

##### (1)適用内視鏡

OLYMPUS LF-TP/LF-DP/LF-GP  
OLYMPUS CYF-5A

##### (2)適用ライトガイド

WA03200A  
WA03202A  
A03200A  
A3090  
A3091  
A3093  
A3290  
A3291  
A3293

#### 作動・動作原理

光源装置で発生した光をライトガイド、ライトガイドアダプターを介して伝達することにより、内視鏡内蔵のライトガイドに照明光を供給することを目的としている。

### 【使用目的又は効果】

#### 使用目的

本品は、当社指定の内視鏡にライトガイドを接続することを目的とする。

### 【使用方法等】

#### 使用方法

- 1.ライトガイドアダプターの内視鏡取り付け部を内視鏡本体の光源接続部に装着する。
- 2.ライトガイドアダプターが止まるまで回して、しっかりと内視鏡本体へ固定する。
- 3.ライトガイドをライトガイドアダプターのライトガイド取り付け部に装着する。
- 4.ライトガイドの固定リングを止まるまで回して、しっかりとライトガイドアダプターへ固定する。
- 5.使用後は、本製品と併用する当社内視鏡の『取扱説明書』を参照すること。

使用方法に関する詳細については、本製品と併用する当社内視鏡の『取扱説明書』を参照すること。

#### 使用方法等に関連する使用上の注意

- 1.本製品の取り扱いと保管は慎重に行うこと。衝突や落下などの機器的衝撃にさらさないこと。機器が損傷するおそれがある。

### 【使用上の注意】

#### 重要な基本的注意

##### 1.一般的事項

- (1)本製品は、出荷前に洗浄、消毒および滅菌されていないため、使用前に洗浄、消毒（または滅菌）を行うこと。洗浄、消毒（または滅菌）せずに使用すると感染するおそれがある。
- (2)ライトガイドを取りはずした直後は、内視鏡の光源接続部に接続された本製品およびライトガイドの接続部が非常に熱くなっているため触れないこと。患者や術者がやけどするおそれがある。
- (3)ライトガイドは光源装置から取りはずした直後、非常に熱くなっているため触れないこと。患者や術者がやけどするおそれがある。

#### 不具合

##### その他の不具合

破損、洗浄・消毒・滅菌不良

#### 有害事象

##### その他の有害事象

患者・術者などの感染、やけど

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 保管方法

使用後は、本製品と併用する当社製内視鏡の『添付文書』や『取扱説明書』に従い、洗浄、消毒、滅菌および保管すること。

#### 耐用期間

本製品は消耗品（修理不可能）である。本製品と併用する当社製内視鏡の『添付文書』や『取扱説明書』に示す使用前点検および定期点検を実施し、点検結果により必要であれば新品と交換すること。

### 【保守・点検に係る事項】

#### 洗浄、消毒、滅菌方法

- 1.ライトガイドアダプターは、消毒（または滅菌）の前に十分に洗浄し、消毒（または滅菌）効果を妨げる微生物や有機物を取り除くこと。なお、洗浄時に洗浄液を過度に泡立たせないようにすること。
- 2.消毒液は十分に洗い流すこと。本製品の外表面および洗浄具類に消毒液が残らないように、滅菌水で十分に洗い流すこと。すすぎに滅菌水を使用できない場合は、飲料水またはフィルターによって微生物が除去された水と消毒用エタノールを使用すること。
- 3.本製品と併用する当社製内視鏡の『取扱説明書』に記載の、洗浄、消毒、滅菌に使用できる薬剤を使用すること。それ以外の薬剤については、内視鏡お客様相談センター、当社指定のサービスセンターまたは当社支店、営業所まで問い合わせること。
- 4.消毒の全工程で本製品を完全に浸漬し、機器の外表面や内面の気泡を完全に取り除くこと。
- 5.オゾン水への浸漬、オゾン発生雰囲気中での保管はしないこと。
- 6.本添付文書および本製品の『取扱説明書』に記載している洗浄、消毒、滅菌方法では、クロイツフェルト・ヤコブ病の病因物質であるプリオンを消失または不活化することはできない。クロイツフェルト・ヤコブ病患者に本製品を使用する場合は、その患者専用の機器として使用するか、使用後適切な方法で廃棄すること。クロイツフェルト・ヤコブ病への対応は、種々のガイドラインに従うこと。

#### **使用者による保守点検事項**

本製品を使用する前には、必ず本製品と併用する当社製内視鏡の『取扱説明書』に従って点検を実施し、異常が確認された場合は使用しないこと。

#### **\*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元：

**オリンパスメディカルシステムズ株式会社**

〒192-8507 東京都八王子市石川町 2951

お問い合わせ先

TEL 0120-41-7149（内視鏡お客様相談センター）