

ディスポーザブル吸引バルブ MAJ-209

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止


使用方法

本製品を再滅菌しないこと。

【形状・構造及び原理等】

構造・構成ユニット

- 製品名称
ディスポーザブル吸引バルブ MAJ-209
- 各部の名称

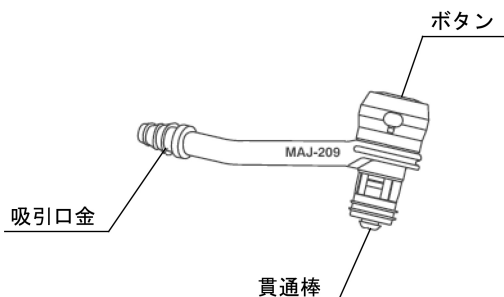

作動・動作原理

吸引操作

ボタンを押すことで、貫通棒が飛び出し、その貫通棒にある穴によって、吸引バルブ本体と内視鏡の管路が連通する。
吸引器と組み合わせて使用することで、ボタンを押すと、吸引器と内視鏡の管路が連通し、内視鏡挿入部の先端から、体液などを吸引することができる。

【使用目的又は効果】


使用目的

本品は当社指定の内視鏡と組み合わせて、体内の体液などを吸引することを目的とする。

【使用方法等】

*使用方法

- 点検
(1)滅菌パックを点検する。
(2)吸引バルブの外観と作動を点検する。
- 内視鏡への取り付け
(1)内視鏡操作部の指標と吸引バルブの吸引口金の向きを合わせて、カチッというクリック感があるまで内視鏡の吸引シリンダー開口部に押し込む。

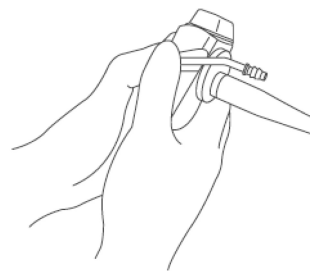

- (2)吸引バルブが吸引シリンダーにすきまなく取り付けられていることを確認する。
- 吸引
(1)吸引口金に吸引器に接続した吸引チューブを接続する。
(2)吸引バルブのボタンを押し、吸引を行う。
- 吸引バルブの取りはずし
吸引口金を時計回りに回し、吸引バルブを内視鏡から取りはずす。
- 廃棄
吸引バルブの使用が終了したら、適切な方法で廃棄する。

使用方法に関する詳細については、本製品の『取扱説明書』の「6 準備」、および「7 使用方法」を参照すること。

組み合わせて使用する医療機器

本製品は、以下の機器または同等品と接続して用いる。

組み合わせ機器	商品記号	販売名	医療機器認証番号
内視鏡	BF-XP290	EVIS LUCERA ELITE 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-XP290	225ABBZX 00178000

*使用方法等に関連する使用上の注意


本製品や内視鏡の吸引管路が詰まり、吸引が止まらなくなるおそれがあるため、固形物や粘度の高いものを吸引しないこと。

【使用上の注意】


*重要な基本的注意

一般的事項

- 1.本製品を用いた処置は、術野が確保された状態で慎重に扱うこと。
- 2.使用中に吸引バルブがはずれ、患者体液などが漏れるおそれがあるため、吸引バルブは吸引シリンダーにすきまがないよう確実に取り付けること。

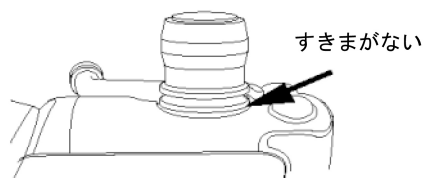

正しく取り付いている

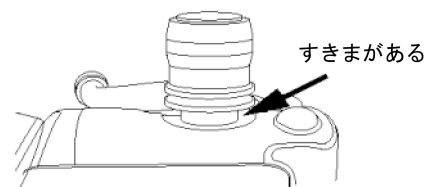

正しく取り付いていない

- 3.吸引チューブから汚物が漏れるおそれがあるため、吸引器に接続された吸引チューブを、内視鏡の操作部に装着された本製品の吸引口金にしっかり接続すること。
- 4.吸引バルブが機能しなくなり吸引が止まらなくなるおそれや、患者体液や汚物が漏れるおそれがあるため、吸引器の吸引圧は、670hPa 以下に設定しないこと。
- **5. 気管支鏡検査では血中酸素分圧は一時的に低下する傾向にあるが、機器の故障等の予期せぬ事態により痰や体液の吸引が遅れた場合、十分な呼吸が妨げられ、低酸素血症が重篤化する恐れがあるため、不測の事態に備え、必ず予備の機器を用意し、速やかに交換できるようにすること。

*不具合

その他の不具合

破損、管路の詰まり

**有害事象

その他の有害事象

感染、低酸素血症

*【保管方法及び有効期間等】

保管方法

詳細は本製品の『取扱説明書』の「5 保管」を参照すること。

有効期間

滅菌パックに表示された使用期限を確認すること（自己認証（当社データ）による）。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：

オリンパスメディカルシステムズ株式会社

〒192-8507 東京都八王子市石川町 2951

お問い合わせ先

TEL 0120-41-7149（内視鏡お客様相談センター）

取扱説明書を必ずご参照ください。