

イリフローセット

再使用禁止

*【禁忌・禁止】

再使用禁止

*【形状・構造及び原理等】

構造・構成ユニット

1.構成

本製品は、以下より構成される。


5920002BX イリゲーションデリバリーシステムセット
5920000 イリゲーションデリバリーシステム

- 注1) 本製品は単品で製造販売する場合がある。
注2) 本製品は再使用禁止である。


**2.各部の名称

★は、使用中生体粘膜等に触れる部分である。

5920002BX イリゲーションデリバリーシステムセット

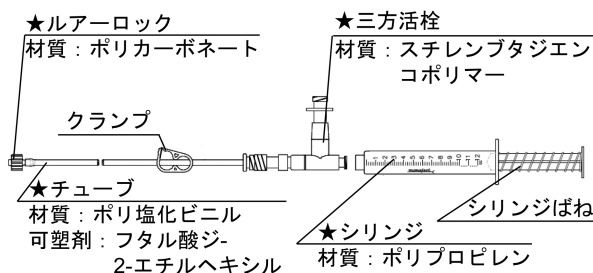

5920000 イリゲーションデリバリーシステム

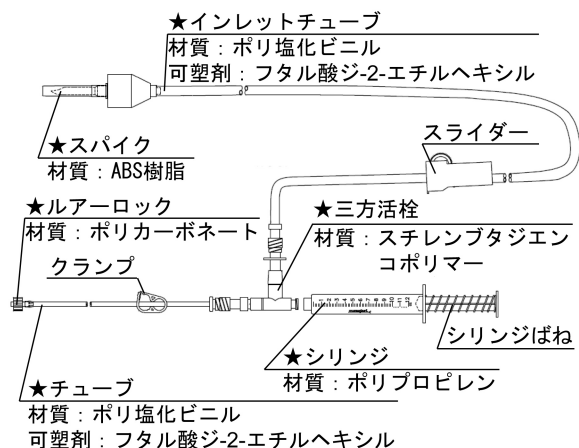

3.仕様

	チューブ	インレットチューブ
有効長	914mm	2438mm
最大径	Φ4.75mm	Φ6.4mm
滅菌	エチレンオキサイドガス滅菌済み ディスポーザブル製品	

作動・動作原理

構造：灌流液が送液されるチューブおよび灌流を制御するシリンジより構成される。5920000 イリゲーションデリバリーシステムには内視鏡用送水装置に接続するためのインレットチューブが含まれるが、5920002BX イリゲーションデリバリーシステムセットには含まれず、ほかの送水・吸引チューブを組み合わせ使用。

原理：三方活栓と組み合わせたインレットチューブまたは別売の送水・吸引チューブを内視鏡用送水装置の灌流液バッグに接続し、ルアーロックを内視鏡に接続して灌流を行う。シリンジを押すと灌流液が流れ、離すと止まるため、灌流の制御が可能となる。

*【使用目的又は効果】

使用目的

本品は体腔または管腔の内視鏡による観察を容易にするため、液体で灌流することを目的とする。

*【使用方法等】

使用方法

- 1.使用前に滅菌パックの点検、本製品の点検を行う。
- 2.シリンジ、三方活栓およびチューブを組み立てる。
- 3.5920002BX イリゲーションデリバリーシステムセットの場合は別売の送水・吸引チューブ、5920000 イリゲーションデリバリーシステムの場合は同梱のインレットチューブを三方活栓に接続し、内視鏡用送水装置の灌流液バッグに接続する。
- 4.クランプを閉じた状態でシリンジを操作し、本製品の内部を灌流液で満たす。
- 5.ルアーロックを内視鏡に接続する。
- 6.クランプを開放し、シリンジを操作して灌流を行う。
- 7.使用終了後、本製品を適切な方法で廃棄する。

本製品の使用方法の詳細は、内視鏡用送水装置に付帯する『取扱説明書』を参照すること。

使用方法等に関連する使用上の注意

- 1.使用前には、内視鏡用送水装置に付帯の『取扱説明書』に従って準備と点検、接続を確認すること。
- 2.水ぬれに注意し、直射日光、紫外線の当たる場所は避け、常温、常湿の室内に清浄な状態で保管すること。

【使用上の注意】

**重要な基本的注意

一般的事項

- 1.本製品を用いた処置、取り扱いには術野が確保された状態で慎重に行うこと。
- 2.規定の位置で固定しないと、取り扱いによっては使用中にチューブが折れ曲がり、送液が正常に行えないおそれがあるため、クランプの位置はずらさないこと。
- 3.本製品は、ポリ塩化ビニル製の医療機器であり可塑剤が溶出する可能性がある。

*不具合

その他の不具合

破損、部品の脱落、変形、腐食

取扱説明書を必ずご参照ください。

***有害事象**

その他の有害事象

感染、穿孔、出血、やけど、組織の炎症

***【保管方法及び有効期間等】**

有効期間

滅菌パックに表示された使用期限を確認すること（自己認証（当社データ）による）。

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元：

オリンパスメディカルシステムズ株式会社

〒192-8507 東京都八王子市石川町 2951

お問い合わせ先

TEL 0120-41-7149（内視鏡お客様相談センター）

外国製造元：

ジャイラス・エーシーエムアイ社

Gyrus ACMI, Inc.

国名：アメリカ合衆国

取扱説明書を必ずご参照ください。