

把持鉗子 S640026

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】


構造・構成ユニット

1.構成

本製品は、操作部と挿入部から構成されている。

2.各部の名称

★は、使用中体腔内組織に触れる部分である。

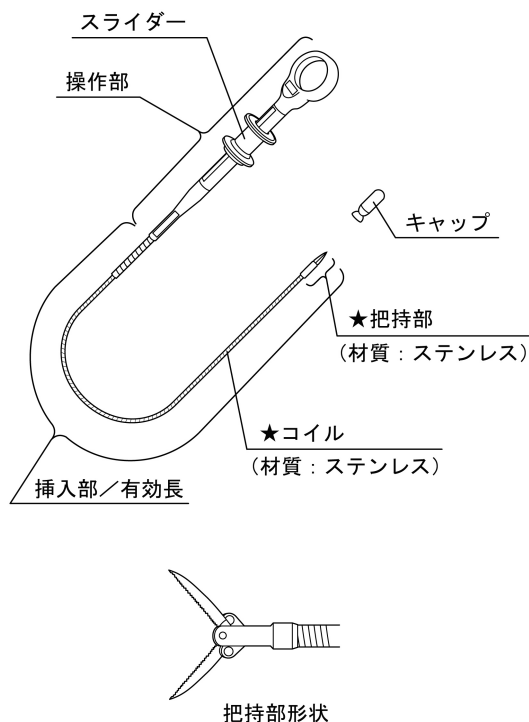

**3.仕様

機種	S640026
把持部形状	先端細り
最大外径 (mm)	Φ1.5
有効長 (mm)	1050

詳細は『取扱説明書』の「7. 仕様」を参照すること。

作動・動作原理

スライダーを先端側に動かすと把持部が開き、手元側へ動かすと把持部が閉じる。目的の組織に開いた把持部を押しつけ把持部を閉じることにより組織を把持できる。

*【使用目的又は効果】

使用目的

本品は当社指定の内視鏡と組み合わせて組織を把持することを目的とする。

*【使用方法等】

**使用方法

- 点検
滅菌パックの点検、本製品の外観の点検、作動の点検をする。
- 内視鏡への挿入
(1)スライダーを引き、把持部を閉じる。
(2)内視鏡の鉗子栓に鉗子を閉じた状態で、挿入部先端が内視鏡の視野内に入るまで挿入する。
- 組織の把持
(1)目的の組織を把持するため、本製品を必要な長さまで挿入する。
(2)スライダーを押し、把持部を開く。
(3)スライダーを引き、目的の組織を把持する。
- 内視鏡からの引き抜き
スライダーを引き把持部を閉じた状態で、内視鏡から本製品を引き抜く。
- 廃棄
本製品の使用が終了したら、適切な方法で廃棄する。

**組み合わせて使用する医療機器

本製品と組み合わせて使用可能な機器は以下である。

当社内視鏡	有効長	400mm 以下
	チャンネル径	Φ1.7mm 以上

使用方法等に関連する使用上の注意

一般の事項

- 1 症例中に繰り返し使用する場合は、使用ごとに作動と外観に異常がないことを確認のうえ、使用すること。
- (2)本製品の挿入部を直径 15cm より小さく丸めないこと。
- (3)挿入部先端を内視鏡から突き出している状態で、急激な内視鏡のアングル操作をしないこと。

詳細は『取扱説明書』の「9. 使用法」、「10. 廃棄」を参照すること。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

**一般の事項

- (1)内視鏡の視野を確保した状態で、本製品の先端の位置や動きを確認しながら、ゆっくりと慎重に本製品の挿入等の操作すること。
- (2)スライダーを保持し把持部を閉じた状態で本製品を挿入し、無理な力で把持部を体腔内の組織に押し付けたり、開閉したりしないよう操作すること。
- (3)把持部が組織に刺さった場合は、把持部を閉じたままゆっくりと慎重に引き抜くこと。
- (4)使用中に把持部の開閉がスムーズにできなくなった場合は本製品の使用を中止し、体腔内を傷付けないように注意しながら本製品を内視鏡ごと体内から引き抜くこと。
- (5)本製品の操作中に少しでも抵抗を感じたり、把持部の位置や動きの異常に気付いたときは操作を中止し、無理なく操作できるところまで内視鏡のアングルを戻すこと。
- (6)内視鏡から本製品を引き抜く際は、内視鏡のアングルを戻した状態で、ゆっくりと引き抜くこと。

取扱説明書を必ずご参照ください。

詳細は『取扱説明書』の「8. 保管」、「9. 使用法」、「10. 廃棄」を参照すること。

****不具合**

その他の不具合

機器の破損・脱落、機能の低下

****有害事象**

その他の有害事象

人体への傷害、感染、組織の炎症、穿孔、出血、組織損傷、皮膚の炎症、術者の外傷

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

詳細は『取扱説明書』の「8. 保管」を参照すること。

有効期間

滅菌パックに表示された使用期限を確認すること。
(自己認証(当社データ)による。)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：

オリンパスメディカルシステムズ株式会社
〒192-8507 東京都八王子市石川町 2951

お問い合わせ先
TEL 0120-41-7149 (内視鏡お客様相談センター)

製造元：

青森オリンパス株式会社
〒036-0357 青森県黒石市追子野木 2-248-1

取扱説明書を必ずご参照ください。