

ユニバーサルライトガイドアダプター MAJ-1200

【禁忌・禁止】

*使用方法

光源装置の照明ランプが点灯しているときに、本製品の接続口や本製品に接続されている内視鏡の先端を直視しないこと。[目を痛めるおそれがある。]


【形状・構造及び原理等】

*構造・構成ユニット

1.構成

・ユニバーサルライトガイドアダプター MAJ-1200

2.各部の名称

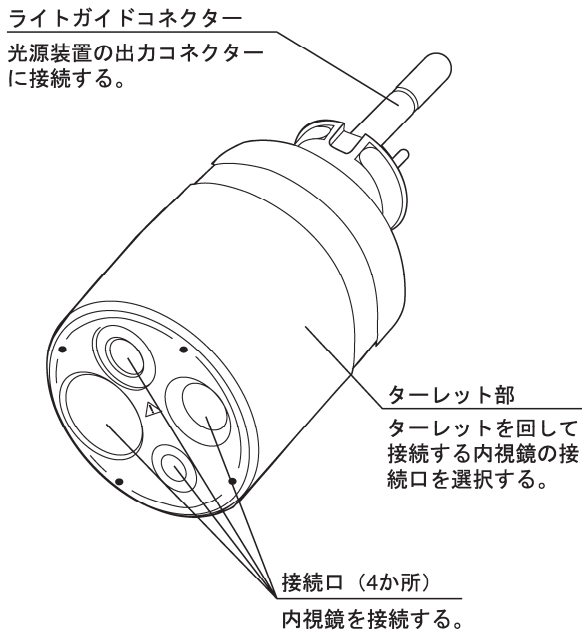

3.仕様

(1)機構部

ライトガイドコネクタ : 光源装置に接続可能
接続口 : 内視鏡を接続可能

(2)組み合わせ可能な当社製光源装置
CLV-S190 または同等品

作動・動作原理

本製品のターレット部を回して接続口を選択することによって、光源装置からの照明光を当社推奨の内視鏡のコネクタに入射させる。

*【使用目的又は効果】

使用目的

本製品を介して、当社推奨の他社内視鏡および当社内視鏡を当社指定の光源装置に接続できるようにすることを目的としている。

*【使用方法等】

- 1.本製品を光源装置の出力コネクタに接続する。
- 2.お手持ちの内視鏡メーカーに合わせてターレット部を回して、接続口を選択する。
- 3.内視鏡を接続口に接続する。
- 4.光源装置の電源スイッチを押して照診ランプを点灯させる。
- 5.光源装置の光量調節スイッチを押して観察に必要な最低限の明るさに適宜調節する。

詳しくは、本製品の『取扱説明書 7.使用方法』を参照すること。

使用方法等に関連する使用上の注意

本製品に内視鏡を着脱するときは、ライトガイドコネクタのオレドメ（柔らかい部分）部を持たないで操作すること。オレドメ部を持って着脱すると、内視鏡が破損するおそれがある。

【使用上の注意】

*重要な基本的注意

- 1.内視鏡が汚れている場合は、そのまま接続せずに、その『取扱説明書』に従って洗浄してから本製品に接続すること。内視鏡が熱的損傷を起こして適切な照明光が得られなくなるだけでなく、患者や使用者がやけどするおそれがある。
- 2.内視鏡を使用しないときは、以下の操作を行うこと。
本製品接続口からの出射光により目を痛めるおそれがある。
 - 本製品を CLV-S40 に接続するときは、ターレット部を回転させ、遮光位置（4 か所）で止める、もしくは光源装置の電源スイッチを切る、もしくはスタンバイスイッチを 1 度押し、スタンバイモードにする。
 - 本製品を CLV-S40 以外の当社指定の光源装置に接続するときは、ターレット部を回転させ、遮光位置（4 か所）で止める、もしくは光源装置の電源スイッチを切る、もしくはランプボタンを押して、照明ランプを消灯する。
- 3.光源装置は常に観察に必要な最低限の明るさに調整すること。必要以上の明るさにすると組み合わせる装置を破損したり、目を痛めたりやけどするおそれがある。
- 4.光源装置から取りはずした直後の本製品のライトガイドコネクタや、本製品から取りはずした直後の内視鏡のライトガイドコネクタには直接触れないこと。非常に熱くなっているため、やけどするおそれがある。

*不具合

その他の不具合

内視鏡の破損、故障

*有害事象

その他の有害事象

目を傷める、やけど

取扱説明書を必ずご参照ください。

*【保管方法及び有効期間等】

保管方法

使用後は、『取扱説明書 8.手入れと保管』に従い、保管すること。

耐用期間

本製品の耐用期間は製造出荷後（納品後）6 年とする（自己認証（当社データ）による）。

なお、この年数は耐用期間内に添付文書や『取扱説明書』に示す使用前点検および定期点検を実施し、点検結果によって修理またはオーバーホールが必要な場合にはそれらを実施する等の適正使用をした場合の年数である。

【保守・点検に係る事項】

*使用者による保守点検事項

使用前に、『取扱説明書』に従って点検すること。点検結果により修理またはオーバーホールを必要であれば実施すること。

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：

オリンパスメディカルシステムズ株式会社
〒192-8507 東京都八王子市石川町 2951

お問い合わせ先
TEL 0120-41-7149（内視鏡お客様相談センター）

取扱説明書を必ずご参照ください。