

*吸引ボタン

【形状・構造及び原理等】


構造・構成ユニット

*1. 構造・構成

本製品は、ボタン、バネ、ピストンから構成されている。

*・吸引ボタン *MD-159

2. 各部の名称

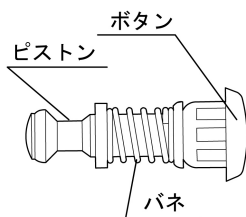

3. 仕様

全長	31.5mm
外径	Φ16mm
組み合わせ可能な当社製内視鏡	OES 胆道ファイバースコープ OLYMPUS CHF-P20 OES 胆道ファイバースコープ OLYMPUS CHF TYPE T20 OES 胆道ファイバースコープ OLYMPUS CHF TYPE P20Q OES 胆道ファイバースコープ OLYMPUS CHF TYPE XP20 OES ヒステロファイバースコープ OLYMPUS HYF TYPE 1T

作動・動作原理

ボタンを指で押し込むことにより、鉗子出口より吸引できる。

【使用目的又は効果】

使用目的

本品は当社指定の内視鏡と組み合わせて、体内の体液などを吸引することを目的とする。

【使用方法等】

使用方法

1. 消毒、滅菌

決められた方法で消毒または滅菌を行う。

2. 取り付け

内視鏡の操作部に吸引ボタンを取り付ける。

3. 吸引

吸引ボタンを押し下げて吸引する。

4. 取りはずし

内視鏡から吸引ボタンを取りはずす。

5. 消毒、滅菌

使用後は「1. 消毒、滅菌」と同様に消毒、滅菌を行う。

使用方法に関する詳細については、本製品と組み合わせ可能な当社製内視鏡の『取扱説明書』を参照すること。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 一般的事項

- (1) 本製品は、出荷前に洗浄、消毒および滅菌されていないため、使用前に洗浄、消毒（または滅菌）を行うこと。洗浄、消毒（または滅菌）せずに使用すると感染するおそれがある。
- (2) 吸引器の吸引圧は、0～34kPa の範囲に設定すること。吸引圧が強いと吸引ボタンがもとに戻らなくなり、吸引が止まらなくなるおそれや、患者体液や汚物が鉗子栓から漏れたり、術者や患者に飛散し、感染を起こすおそれがある。
- (3) 固形物や粘度の高いものを吸引しないこと。吸引チャンネルが詰まったり、吸引ボタンに引っ掛かって吸引が止まらなくなるおそれがある。
- (4) 吸引ボタンが詰まって吸引が止まらなくなった場合は、吸引口金から吸引チューブを取りはずして、吸引を止めること。その後、吸引ボタンを取りはずして固形物を除去すること。
- (5) 強力な吸引力で粘膜に密着させて吸引を続けると、出血したり体腔内を傷付けるおそれがある。

不具合

その他の不具合

本製品および周辺機器の故障・破損、脱落、劣化、洗浄・消毒・滅菌不良

有害事象

その他の有害事象

患者・術者などの感染、体腔内の損傷、出血

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

使用後は、本製品と組み合わせ可能な当社製内視鏡の『取扱説明書』に従い、洗浄、消毒、滅菌および保管すること。

耐用期間

本製品は消耗品（修理不可能）である。本製品と組み合わせ可能な当社製内視鏡の『取扱説明書』に従って点検を実施し、異常があれば新品と交換すること。

【保守・点検に係る事項】

洗浄、消毒、滅菌方法

1. 吸引ボタンは、消毒（または滅菌）の前に十分に洗浄し、消毒（または滅菌）効果を妨げる微生物や有機物を取り除くこと。なお、洗浄時に洗浄液を過度に泡立たせないようにすること。
2. 本製品と組み合わせ可能な当社製内視鏡の『取扱説明書』に記載の、洗浄、消毒、滅菌に使用できる薬剤を使用すること。それ以外の薬剤については、内視鏡お客様相談センター、当社指定のサービスセンターまたは当社支店、営業所まで問い合わせること。
3. 本製品の外表面および内面に消毒液が残らないように、清潔な水で十分にすすぐこと。
4. 本添付文書および本製品と組み合わせ可能な当社製内視鏡の『取扱説明書』に記載している洗浄、消毒、滅菌方法では、クロイツフェルト・ヤコブ病の病因物質であるプリオンを消失または不活化することはできない。クロイツフェルト・ヤコブ病患者に本製品を使用する場合は、その患者専用の機器として使用するか、使用後適切な方法で廃棄すること。クロイツフェルト・ヤコブ病への対応は、種々のガイドラインに従うこと。

使用者による保守点検事項

長期の使用により、機器の劣化は避けられない。特に樹脂などの部分は、使用薬剤による影響や経時変化によっても劣化する。本製品と組み合わせ可能な当社製内視鏡の『取扱説明書』に示す使用前点検を実施し、点検結果により異常があれば使用しないこと。

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元：

オリンパスメディカルシステムズ株式会社

〒192-8507 東京都八王子市石川町 2951

お問い合わせ先

TEL 0120-41-7149（内視鏡お客様相談センター）